

IM-302

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

お客様様	名称	三浦歯科医院	製造番号	14090188	点検実施日	2018年8月24日	モリタ用 作業専用 IHIアグリテック用
	住所	久喜市南栗橋4-19-4	運転回数	1322	点検実施者	中村(裕)	
	納入場所		サービス形態	保守点検	モリタ担当部署	北関東支店	
					二承認印		三浦

計装(安全)



圧力計0点指示誤差

ドア



フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認



開閉ハンドル取付け状態・動作確認



フック取付け状態・動作確認



フックパネ・フック蝶番ピンの取り付け状態



ビス・ナット・ホーローセット増し締め



ドアカバーの取り付け状態・割れ



フック検出ユニット作動確認



ドアロックユニット作動確認



蓋板のキズ・汚れ



開閉ハンドルの損傷確認

缶体



割れ・キズ・腐食・汚れの有無



滅菌温度センサの汚れ



網カゴの破損・汚れ



缶内ストレナーの損傷・汚れ

配管系



フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ



シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ



給気弁の作動状態・漏れ



排蒸弁の作動状態・漏れ



真空・乾燥弁の作動状態・漏れ



滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)



ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)



ストレナーの汚れ



排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損



安全弁(滅菌室)の漏れ



安全弁(蒸気発生器)の漏れ



ダンプナーの漏れ・溶接割れ



大気圧検知圧カスイッチの作動状態・漏れ



ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器



ソケット他溶接割れ・漏れ



フランジパッキン漏れ



ヒーター取り付け状態・漏れ



空焚き防止器・温度センサ取り付け状態



電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ



逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ



水漏れ・異常音の確認



真空到達度

給水タンク



給水タンクの損傷・漏れ



下部給水弁の漏れ



蓋・取っ手の損傷・割れ



フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク



ダシクの汚れ・漏れ



フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系



タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ



ディスプレイの色あせ・表示確認



電源スイッチの作動状態



行程表示LEDの点灯



電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ



各基板のコネクター端子確認



端子の緩み・コネクターの接続確認



配線の変色・損傷有無・結束状態



圧力センサーの取付け状態・入力確認



ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置



本体の水平確認・基準傾き内



アジャスタフットの緩み・設置状態



キズ・汚れ



制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御



運転プログラムの確認



入力・出力確認



試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品



ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ



エアフィルターつまり・汚れ

性能評価



B&Dテスト実施



ケミカルインジケータによる判定



リークチェック




キャリブレーションの実施(温度・圧力)

インジケータ貼り付け



運転確認

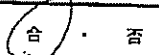

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030