


宛先 林歯科クリニック えもり 様 FAX: 048-664- 1212 ¹¹¹ 7	発信 平成30年6月11日 (株) IHI アグリテック (旧社名: IHI シバウラ) 環境プロジェクト部 サービスGr 中澤
写) 宛先	電話 (086) 944-6528 ファクシミリ (086) 942-9030
件名 ウォッシャー WD-150 循環水圧低下	

拝啓 時下 ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。
 日頃は大変お世話になっております。
 標記の件、確認していただきたい箇所を FAX いたしますので
 よろしく願いいたします。



敬具

—記—

1: 洗浄フィルター3の内側と外側に「膜状のゴミ」が付着していないか

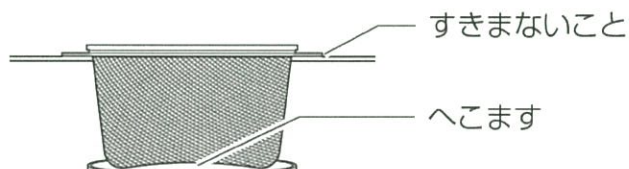

2: 上段ラックのゴム部分がずれていないか、スプレーアームは正常か

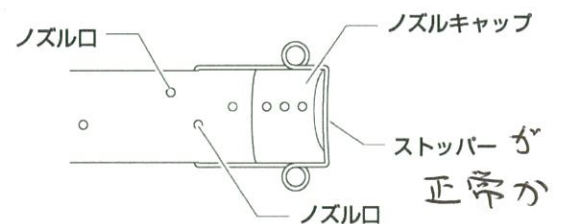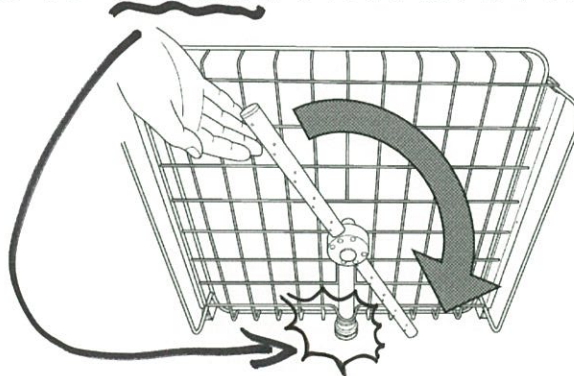

3: 「ハンドピースラック」や「ハンドピースホルダ」の使用していない穴を塞いでいるか。(何もつけていない場合、噴出量が増えてエラーが出やすくなります)

- ・ 循環ポンプ?
- ・ 上段ラックのゴム?
- ・ オーバーフロー管が 流失
- ・ 仕上剤の泡

