

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 10月 29日

ウォッシャーディスインフェクター WD-150	
作業年月日	2018 年 10 月 4 日 作業時間: 4 Hr
顧客名	はら歯科医院 様
所在地	栃木県小山市西西城南6-35-7
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 14080149	運転回数: 2016
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
① エラー5 排水不良		
原因		
① 排水ポンプインペラ破損 . . . 排水ポンプ内異物混入による破損		
処置、作業内容		
・排水ポンプ交換		
・各種調整、清掃、運転動作確認		
・定期メンテナンス実施		
特記事項		
・洗浄槽内フィルターおよび槽内洗浄消毒モードの定期的な実施をお願い致します		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	排水ポンプ		1		
2	DPIチューブ		2セット		
3	ドアパッキン		1セット		
4	HEPAフィルター		1セット		
5	プレフィルター		1セット		
6					
7					
		1 有償 2 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

2018年10月29日
はら歯科医院
原 敏 博
TEL 0285-43-6055 印

修理業者


株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者


環PJ
18/10/29
安田

環PJ
18/10/29
安田

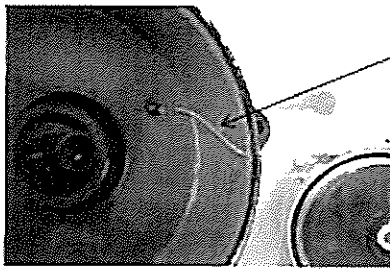


排水ポンプに異物がつまりフィンが回らなくなった


他にもこのようなものが詰まっていました。

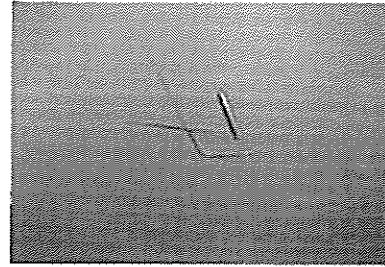

排水ポンプを交換

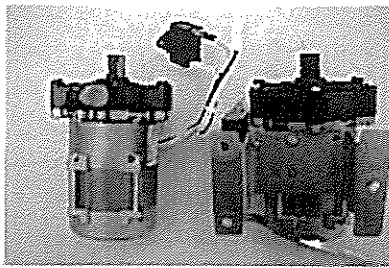


定期交換キット

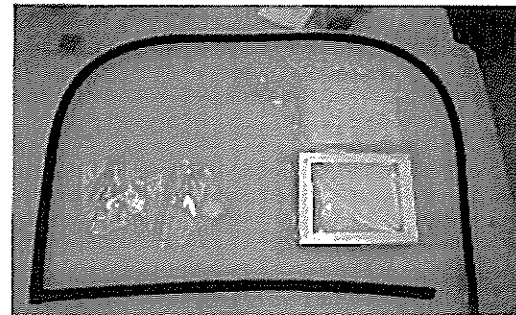

ドアパッキンの傷

HEPAフィルター(定期交換部品)交換

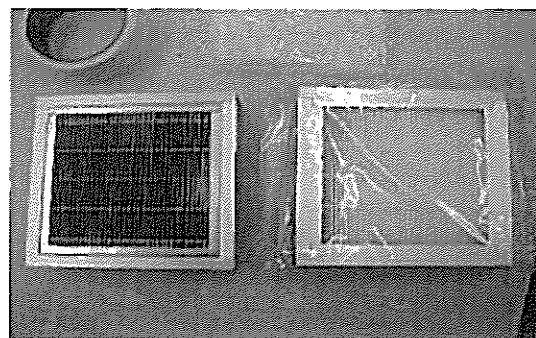

器具除染用洗浄機 WD-150点検報告書

お客様	はら歯科医院 様	製造番号	14080149	点検実施日	2018/10/27	ご承認印
	栃木県小山市西武城南6-35-7	運転回数	2016 回	点検実施者	岡山事業所サービスGr 安田	
		サービス形態	点検・修理			

ドア機能

- ☐ 開閉動作確認
- ☒ ドアバック目視点検 (傷有)
- ☐ ドアフックの掛かり・締め付け量確認
- ☐ ドア締め付けスイッチ作動確認
- ☐ インターロック動作確認
- ☐ テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ☐ ドアパネルの取付け状態・キズ
- ☐ ドアヒンジの動作
- ☐ ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ☐ ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- ☐ 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
- ☐ 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☐ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☐ ローラーポンプの動作確認
- ☐ 流量計の検出状態
- ☐ 洗剤投入の確認
- ☐ 洗剤レベルセンサーの作動確認

乾燥ユニット

- ☐ 乾燥ファンの取り付け状態
- ☐ 乾燥ファンの作動状態・異音
- ☐ 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- ☐ プレフィルターの汚れ
- ☐ メインフィルターの汚れ (HEPAフィルター)

配管系

- ☐ ストレーナーの清掃 (給水・給湯)
- ☐ 外部給水・給湯配管の継手の損傷・漏れ
- ☐ 外部排水継ぎ手・ホースの漏れ
- ☐ 給水回路配管 (ホース) の取り付け状態・漏れ
- ☐ 排水回路配管 (ホース) の取り付け状態・漏れ
- ☐ 循環回路配管 (ホース) の取り付け状態・漏れ
- ☐ 給水弁の作動状態・漏れ
- ☐ 給湯弁の作動状態・漏れ
- ☐ RO水弁の作動状態・漏れ
- ☐ 水位圧カススイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
- ☐ 給水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☐ 排水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☐ 凝縮期の取り付け状態・漏れ
- ☐ 乾燥エア回路逆止弁の作動状態・漏れ

ポンプ

- ☐ 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☐ 循環ポンプの作動状態・異音
- ☐ 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- ☐ 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動状態・異音

洗浄槽

- ☐ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- ☐ 槽内LEDが各工程色で点灯している
- ☐ 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
- ☐ 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ☐ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ☐ 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- ☐ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☐ ヒーター過昇防止器の取り付け状態・汚れ

電装系

- ☐ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☐ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☐ 電源スイッチの作動状態
- ☐ 行程表示LEDの点灯
- ☐ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☐ 各基板のコネクター緩み確認
- ☐ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☐ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☐ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☐ ヒーター配線の緩み・変色有無 (加温・乾燥)
- ☐ SDカードの書き込み確認

外装・設置

- ☐ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☐ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☐ キズ・汚れ
- ☐ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

消耗品

- ☒ ドアバックの損傷・劣化・汚れ (点検交換)
- ☒ エアフィルター (プレ) のつまり・汚れ (交換)
- ☒ エアフィルター (プレ) のつまり・汚れ (交換)
- ☒ 洗剤ポンプチューブ (点検交換)


性能評価

- ☐ インジケーターによる残渣判定 (TOSI)

(機械部清掃・水漏れチェック)

運転確認	
合	否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

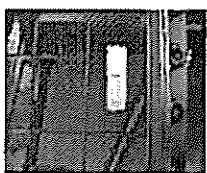交換部品 (名称・型式)	数量
  排水ポンプ・フィルター・点検キット (ドアバック・洗剤チューブ・ヘパ)	

株式会社IHアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030

〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 株式会社アグリテック
 環境プロジェクト部 サービスグループ
 TEL 0285-43-6055

《不具合対応報告書》

担当者: 中村

【発生日】 年 月 日 ?

【対応日】 2018 年 10 月 30 日

【連絡元】 ☐ モリタ (担当者:)

☐ ユーザー

☐ その他 (廣瀬)

【ユーザー名 & 県名】

栃木県: ほう南科医院

WD-150

IC Washer【機番: 14060077】※ 当社デモ機

【症状】

・エラー No.3 : 機器内漏水

・右上部コネクター (Xス側) 破損

【対応方法】 ☒ 引取り修理 (代替機 no.)

☐ 現地対応

《対応内容》 ☐ 部品交換 ()
☐ その他 ()

【給水方法】 ☐ 水

☒ 水 & お湯

【ラック種類】 ☒ 標準ラック

☒ ハンドピース用ラック

《メタリ検査の適用》 ☐ 有 ☐ 無

《SUSファイナラーの洗浄》 ☐ 有 ☐ 無

【備考】

・代替機にて、エラー発生を止め、

修理機を返印致す。完了

・返印機に付いては、修理・メンテナンス(点検)を

実施する。 ※ 別紙を参照下さい。

IC Clave【機番: 】

【症状】

【対応方法】 ☐ 引取り修理 (代替機 no.)

☐ 現地対応

《対応内容》 ☐ 部品交換 ()
☐ その他 ()

【給水方法】 ☐ アイオニー使用

☐ 精製水購入

☐ その他 ()

【滅菌バッグ】 ☐ ディスポ

☐ リユース

【網の種類】 ☐ トレー網

☐ 網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐ 有 ☐ 無

【設置場所】

【備考】