

《不具合対応報告書》

担当者: 廣瀬・小笠原

【発生日】 2018年 10月 26日
【対応日】 2018年 10月 29日
【連絡元】 ■モリタ (担当者: 北関東 水村 様)
□ユーザー
□その他 ()
【ユーザー名 & 県名】 埼玉県 あさか歯科医院

IC Washer【機番: 100182】

IC Clave【機番: 100234】

【症状】

修理・改修対象機の返却

【症状】

- ・滅菌中に「ピー」という音がして運転が停止した
- ・メンテナンス依頼

【対応方法】 □引取り修理 (代替機no.)

□現地対応

《対応内容》 □部品交換 ()
□その他 ()

【対応方法】 ■引取り修理 (代替機no. 100217)

□現地対応

《対応内容》 □部品交換 ()
□その他 ()

【給水方法】 □水

■水 & お湯

【給水方法】 □アイオニー使用

■精製水購入

□その他 ()

【ラック種類】 ■標準ラック

□ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 □有 □無

《SUSフィルターの洗浄》 □有 □無

【滅菌バッグ】 ■ディスポ

□リユース

【網の種類】 □トレイ棚

■網バスケット

【備考】

10/22引き上げ機体の返却

※10/22引き上げ時、「循環水压低下」、「槽内温度低下」確認。

改修対象機だったため代替機入替。修理、改修作業時、装置内部に異物確認。10/29ユーザー機返却時に説明を行った。

【ハンドピースの滅菌】 ■有 □無

【設置場所】

【備考】

修理及びメンテナンス依頼
※代替機入替時の動作確認の際、タッチパネルが急に消灯したため、ユーザー機のタッチパネルと交換。

点検・修理報告書

管理 No

発行日: 2018年 10月 29日

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2018 年 10 月 25 日 作業時間: 6 Hr
顧客名	あさか歯科医院 様 TEL: 048-813-8000
所在地	埼玉県さいたま市緑区道祖土2-16-15 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100182	運転回数: 1046	タッチパネルVer. 01.08 CPU Ver. 001014
------	--------------	------------	----------------------------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

① エラー1 漏洩検出

原因

① エルボ破損による機体内漏水

処置、作業内容

- ・ストレートエルボ樹脂継手交換
- ・ドア開閉対策部品交換
- ・各種調整、清掃、運転動作確認

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・ストレートエルボ樹脂継手		1		
2	・ドア開閉部品一式		1		
3					
4					
5					
6					
7					

1. 有償 2. 無償

部品代 合計

技術料

出張料

合計

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2018年 10月 29日

院長 浅香 淳一

ご署名

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

環PJ
'18/10/25
元森

環PJ
'18/10/25
関口

ICW 扉開閉ワイヤー点検実施報告書

お客様 あさか歯科医院 御中 製造番号 100182
住所 埼玉県さいたま市緑区道祖土2-16-15
点検日 2018年 10月 25日
点検時間 ~ 点検者 関口

- ☒ 扉開閉ラインの交換
- ☒ エッジガードの追加
- ☒ 樹脂エルボの交換
- ☒ 最新プログラムへの書き換え
- ☒ 洗剤遅延検知時間の変更(60秒)
- ☒ 防水シートの追加
- ☒ 凝縮エア抜きパネルの交換
- ☒ U字金具によるシリコンシートの固定
- ☒ 漏洩センサー両面テープの交換
- ☒ 排水ポンプコンデンサーの端子保護

特記事項

お客様ご確認ご署名欄

あさか歯科医院

院長 浅 香 淳 一

2018年 10 月 29 日

ご署名

〒336-0907 さいたま市緑区道祖土2-16-15

印

本作業にて知りえた個人情報は、他の目的では使用いたしません。

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部
岡山県岡山市東区西大寺170-6
TEL (086)944-6528