

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 07月 23日

IC Washer	
作業年月日	2018 年 7 月 23 日 作業時間: 6 Hr
顧客名	上尾中央総合病院 歯科口腔外科 TEL: 048-777-2890
所在地	埼玉県上尾市柏座1-10-10 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2017 年 9 月 日 保証期間 内 ☒ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100247	運転回数: 973	タッチパネルVer. 01.08 CPU Ver. 001014
------	--------------	-----------	----------------------------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

① 乾燥ファン異常回転しない

原因

① 熱水消毒後乾燥を未選択時乾燥ファンケース内に水蒸気の結露が入り込み乾燥ファン電子基板のショート
ショートの起きる。

処置、作業内容

① 乾燥ファン交換実施、運転条件で乾燥工程を選択してなくても乾燥ファンケース内の結露防止対策プログラムに入換を実施。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	乾燥ファン交換		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2018 年 7 月 26 日

ご署名

道上



修理業者

株式会社HIAグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
桐野	桐野
18/07/23	18/07/23