

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 11月 13日

機種/型式	ワッシャー・ディスプレイ - IC Washer		
作業年月日	2018年 10月 26日	作業時間:	Hr
顧客名	ヒノキオ歯科クリニック	TEL:	049-265-5914
所在地	埼玉県富士見市西みずほ台1-21-20-107	ご担当	様
販売店	株式会社モリタ 北関東支店	ご担当	山中 様
納入年月日	2018年 8月 22日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付	☐

装置情報	製造番号: 1003-4	運転回数:
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・ タッチパネルの暗転		
原因		
・ ドアからの水漏れによる。		
タッチパネル用 DC 5V 電源のショート		
処置、作業内容		
・ DC 5V 電源を交換 正常動作		
・ 90℃ 5分の運転で、異常発生を確認 正常動作		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	DC 5V 電源		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					

お客様ご確認署名欄 ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・ 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計	
		技術料	
		出張料	
		ヒノキオ歯科クリニック 埼玉県富士見市西みずほ台1-21-20 西みずほ台マンション107号 TEL 049-265-5914 ご署名 院長 川田 祐 印	

修理業者

株式会社IHアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者