

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 3 月 4 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2019 年 2 月 26 日		作業時間： Hr
顧客名	高田歯科医院	様	TEL： 0480-33-6697
所在地	埼玉県南埼玉郡宮代町学園台1-12-1		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016 年 5 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号：100113	運転回数：118	運転回数リセット： ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・タッチパネル操作不可			
・エラー18 滅菌異常			
・エラー30 缶内高圧異常			
原因			
・電子回路基板の異常			
・缶内温度センサーの計測異常			
処置、作業内容			
・電子回路基板、SDカード基板の交換			
・缶内温度センサー、シャトルバルブの交換			
・各種調整、プログラム更新、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・電子回路基板		1		
2	・SDカード基板		1		
3	・缶内温度センサー		1		
4	・シャトルバルブ				
5					
6					
7					
			1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

〒340-0340
埼玉県南埼玉郡宮代町学園台1-12-1
高田 歯科
TEL・FAX 0480-33-6697

ご署名

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030



責任技術者	作業者
環境PJ '19/03/4 元森	環境PJ '19/03/4 元森