

《不具合対応報告書》

担当者: 中村・小笠原

【発生日】 年 月 日
【対応日】 2019年 1月 10日
【連絡元】 ☐モリタ(担当者:)
 ☐ユーザー
 ☐その他()
【ユーザー名 & 県名】 埼玉県 ワカバウォーク歯科

IC Washer【機番: 100345】

IC Clave【機番: 】

【症状】

新品入替
100204→100345

【症状】

【対応方法】 ☐引取り修理(代替機no.)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
 ☐その他()

【対応方法】 ☐引取り修理(代替機no.)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
 ☐その他()

【給水方法】 ■水

☐水 & お湯

【給水方法】 ☐アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他()

【ラック種類】 ■標準ラック

☐ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【滅菌バッグ】 ☐ディスポ

☐リユース

【網の種類】 ☐トレイ棚

☐網バスケット

【備考】

前回引き上げの原因となったシャットダウン症状について説明するため、
修理報告書も提出。

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】

点検・修理報告書

管理 No. 2018.12.14

発行日: 2019 年 1 月 9 日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	2018 年 12 月 14 日		作業時間: 1 Hr
顧客名	ワカバウオーク歯科 様	TEL: 049-271-0896	
所在地	埼玉県鶴ヶ島市富士見1-2-1 ワカバウオーク 2 F		ご担当 一 様
販売店	株式会社モリタ 北関東支店		ご担当 照井 様
納入年月日	2017 年 3 月 20 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100204	運転回数:	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
------	--------------	-------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

シャットダウン

原因

・ドア右側からの水漏れによりSDカード基板に水が掛かり、ショート故障が発生。

ショートが発生した際、装置シャットダウンが発生したと考えられる。

(運転確認の結果、ドア右側より水漏れが発生した。SDカード基板についても水漏れによる故障を確認。)

処置、作業内容

・フェーズ2対策の一環であるEPDMの取り外しを実施。

・SDカード基板の交換。

特記事項

・以前の修理対応時にもドア右側板金（EPDM取付け部）の修正を実施したが、同箇所からの水漏れであった。

今回もEPDMと板金に隙間が発生しており、隙間からの水漏れであった。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	SDカード基板		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 山 中 一 郎



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
田中 一 郎	桐野