

株式会社IHIアグリテック  
 環境プロジェクト部 サービスグループ  
 〒704-8122  
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
 TEL 086-944-6528  
 FAX 086-942-9030

# ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

|     |    |                |         |                |     |                                                                                     |
|-----|----|----------------|---------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| お客様 | 名称 | ワカバウォーク 歯科 様   | 製造番号    | 100345         | ご確認 |  |
|     | 住所 | 埼玉県鶴ヶ島市富見1-2-1 | 納入日     | 2019.01.10 (木) |     |                                                                                     |
|     |    | ワカバウォーク 2F     | 納入検査実施者 | IAT 中村, 小笠原    |     |                                                                                     |

| 項目    | 判定 | 検査項目                           | 項目     | 判定          | 検査項目                                |
|-------|----|--------------------------------|--------|-------------|-------------------------------------|
| ドア    | ✓  | 開閉動作確認                         | 外装・設置  | ✓           | 本体の水平確認 ドアLOCK位置確認                  |
|       | ✓  | ドアパッキンキズ・汚れ点検                  |        | ✓           | アジャスタフットの緩み・設置状態                    |
|       | ✓  | ドアロックユニット作動確認                  |        | ✓           | キズ・汚れ                               |
|       | ✓  | ドア緊急時開放スイッチ機構確認                |        | ✓           | ドア開閉時装置設置位置がずれないこと                  |
|       | ✓  | ドア開放スイッチON時の開放状態               | スペース   | ✓           | 装置設置スペースの確保<br>熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと |
| 洗剤ポンプ | ✓  | 洗剤レベルセンサ配線、配管取付                | 制御     | ✓           | 運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認    |
|       | ✓  | 洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の濡れ         |        | ✓           | タッチパネル表示確認・履歴の確認                    |
|       | ✓  | 洗剤投入量の確認                       |        | ✓           | ラック仕様切替(ハイト・スラック) <u>標準ラック</u>      |
|       | ✓  | ローラーポンプの動作確認                   |        | 有・ <u>無</u> | 温水使用切替                              |
| 給排水   | ✓  | 外部給水ホースの取付状態、水漏れ               | 評価機能   | ✓           | インジケーターによる残渣判定(TOSI)                |
|       | ✓  | 排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)  |        | ✓           | 周波数と設置ICWの一致                        |
|       | ✓  | お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水ノ湯逆配管NG)    | その他    | ✓           | 付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付                 |
|       | ✓  | 給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)      |        |             | 運転・お手入れ方法の説明                        |
|       |    | 給湯温度(45~50℃)                   |        | ✓           | 装置内運転時異音・振動                         |
| 電装系   | ✓  | タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ              | 運転検査結果 | ☑ 良好        | トシ                                  |
|       | ✓  | ディスプレイの色あせ・表示確認                |        | ☐ 不良        |                                     |
|       | ✓  | 電源スイッチの作動状態                    |        |             |                                     |
|       | ✓  | SDカードの挿入・取外性                   |        |             |                                     |
|       | ✓  | 電源コードが排気口近傍に配置されていないこと(漏電・熱注意) |        |             |                                     |
|       | ✓  | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ             |        |             |                                     |

特記事項

100204 → 100345 入替