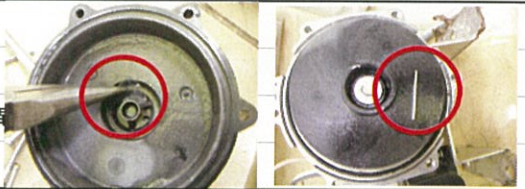


点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 2018 年 11 月 13 日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター WD-150		
作業年月日	2018 年 10 月 30 日		作業時間： Hr
顧客名	あすなろデンタルケア 様	TEL：	048-956-8119
所在地	埼玉県三郷市戸ヶ崎2-243	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2014 年 10 月 30 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14060096	運転回数： 3181
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー19 洗浄槽内満水		
原因		
・排水ポンプ内への異物混入		
※ 排水フィルターが本体より浮いて隙間ができ、そこからバー等の異物が混入し排水ポンプが破損		
		
処置、作業内容		
・排水ポンプの新品交換		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	排水ポンプ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		※別途御見積

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2018年 11 月 14 日
 ご署名 金谷 宏樹 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030



責任技術者	作業者
環PJ '18/11/13 安田	環PJ '18/11/13 安田