

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2018 年 11 月 13 日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	2018 年 10 月 31 日		作業時間： 4 Hr
顧客名	ほんまる歯科医院 様	TEL： 048-749-6480	
所在地	埼玉県さいたま市岩槻区本丸3-20-53 マミーマート岩槻店2F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016 年 7 月 28 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号：100139	運転回数：	運転回数リセット： ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラーNo1 漏洩検知			
原因			
・循環ラインL型エルボ破損			
処置、作業内容			
・循環ラインL型エルボ交換			
・漏洩センサー交換			
・各種調整、清掃、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	循環ラインL型エルボ		1		
2	漏洩センサー		1		
3					
4					
5					
6					
7					

お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計	
		技術料	
		出張料	
		富山県法人社団 高歯会	
		ほんまる歯科医院	

〒339-0058 埼玉県さいたま市岩槻区本丸3-20-53
2018 年 11 月 13 日 マミーマート岩槻店2F

理事長 東 高士
ご署名

TEL 048-749-6480 FAX 048-749-6481

修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030



責任技術者	作業者
環PJ '18/11/12 桐野	環PJ '18/11/12 桐野