

《不具合対応報告書》

担当者: 廣瀬

【発生日】 2019年 5月 29日
【対応日】 2019年 5月 30日
【連絡元】 ☐モリタ(担当者: 北関東 中村)
☐ユーザー
☐その他 ()
【ユーザー名 & 県名】 埼玉県 医療法人中村歯科医院

IC Washer【機番: 100314 】

IC Clave【機番: 】

【症状】

・排水ホース下部に水たまり 床面カビ発生

【対応方法】 ☐引取り修理(代替機no.)

☒現地対応

《対応内容》 ☒部品交換(排水ホース)
☐その他()

【給水方法】 ☒水

☐水 & お湯

【ラック種類】 ☐標準ラック

☒ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☒有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【備考】

・排水ホースつなぎ目より微量の漏れがホースをつたい床面に溜まる

排水ホース交換、ホース長さカット150cm→75cm

本体排水口に漏水防止でシールテープ

その他床面の清掃など

※不具合とは直接関係ないですがゴムブッシュを新型に変更しています

【症状】

【対応方法】 ☒引取り修理(代替機no.)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【給水方法】 ☒アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他()

【滅菌バッグ】 ☐ディスボ

☐リユース

【網の種類】 ☐トレイ棚

☐網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】