

お客様	名称	医療法人 入江齒科医院 入江インプラントセンター様	製造番号	100348 (右側)	二確認	通示
	住所	埼玉県さいたま市浦和区上中郷1-10-15	納入日	2019年1月31日・2月1日		
		入江ビル 2-3F	納入検査実施者	インサービス IAT 中村, 中村, 大山		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目	
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認 ドアLOCK位置確認	
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態	
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ	
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	ドア開閉時装置設置位置がずれないこと	
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	スペース	✓	装置設置スペースの確保 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと	
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	✓	運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認	
	✓	洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認	
	✓	洗剤投入量の確認		✓	ラック仕様切換(ハントピースラック・標準ラック)	
	✓	ローラーポンプの動作確認		有/無	温水使用切換	
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	評価能	✓	インジケーターによる残渣判定(TOSI)	
	✓	排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)		その他	✓	周波数と設置ICWの一致
	✓	お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水/湯逆配管NG)			✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
	✓	給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)			✓	運転・お手入れ方法の説明
	✓	給湯温度(45～50℃)			✓	装置内運転時異音・振動
電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	運転検査結果	☒ 良好 トシ ☐ 不良		
	✓	ディスプレイの色あせ・表示確認				
	✓	電源スイッチの作動状態				
	✓	SDカードの挿入・取外性				
	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと (漏電・熱注意)				
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ				
特記事項						

株式会社IHIアグリテック
 環境プロジェクト部 サービスグループ
 〒704-8122
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL 086-944-6528
 FAX 086-942-9030

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

お客様	名称	医療法人 入江歯科医院 入江インプラントセンター様	製造番号	100349 (左側)	ご確認	痕 永
	住所	埼玉県さいたま市浦和区上木崎1-10-15	納入日	2019年1月31日・2月1日		
		入江ビル 2-3F	納入検査実施者	エーシーサービス IAT 中村 中村 木山		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目	
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認 ドアLOCK位置確認	
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態	
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ	
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	ドア開閉時装置設置位置がずれないこと	
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	スペース	✓	装置設置スペースの確保 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと	
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	✓	運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認	
	✓	洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認	
	✓	洗剤投入量の確認		✓	ラック仕様切替(ハンドピックラック・標準ラック)	
	✓	ローラーポンプの動作確認		有・無	温水使用切替	
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	評価機能	✓	インジケーターによる残渣判定(TOSI)	
	✓	排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)	その他	✓	周波数と設置ICWの一致	
	✓	お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水ノ湯逆配管NG)		✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付	
	✓	給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)		✓	運転・お手入れ方法の説明	
	✓	給湯温度(45~50℃)		✓	装置内運転時異音・振動	
電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	運転検査結果	□	良好	トシ
	✓	ディスプレイの色あせ・表示確認		□	不良	
	✓	電源スイッチの作動状態				
	✓	SDカードの挿入・取外性				
	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと(漏電・熱注意)				
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ				
特記事項						

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030

クラスBオートクレーブ IC Clave 設置報告書

お客様	名称	医療法人 入江歯科医院 入江インプラントセンター様	製造番号	(00384 (E))	ご確認	通 4
	住所	埼玉県さいたま市浦和区	納入検査実施日	2019年1月31日 2月1日		
	上野町1-10-5 入江ビル2・3F	納入検査実施者	インサービス IAT中村 中村 大志			

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア・パッキン	✓	ハンドル開閉検出確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認
	✓	ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ		✓	電源スイッチの作動状態
	✓	ハンドルキズ・汚れ		✓	SDカードの挿入・取外性
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと
	✓	滅菌温度センサの汚れ		✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	✓	棚、トレーのキズ・汚れ		✓	本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。
	✓	缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性		✓	アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態
給水タンク	✓	給水タンクの内部汚れ	制御	✓	キズ・汚れ
	✓	水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない蓋の取付取外しに問題が有るか		✓	運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間)
	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認
排水タンク	✓	LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致	性能評価	✓	B&Dテスト実施 デンタルモード(134℃)確認 40'35"
	✓	タンク内に汚れはないか		✓	リークチェックテスト (P1:2.25(-87.0kPa) P2:-80.59kPa P3:80.31kPa)
	✓	フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		✓	0点調整
スペース	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)	その他	✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
	✓	設置スペースの確保 右90×左50×背面75×天面250mm以上 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと		✓	運転・お手入れ方法の説明
	✓			✓	装置内運転時異音

特記事項

BMS-Test ④ STEAM

: デンタルモード

株式会社IHIアグリテック
 環境プロジェクト部 サービスグループ
 〒704-8122
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL 086-944-6528
 FAX 086-942-9030

クラスBオートクレーブ IC Clave 設置報告書

お客様	名称	医療法人 入江歯科医院 入江インプラントセンター様	製造番号	(00385 (K))	ご確認	通永
	住所	埼玉県さいたま市浦和区	納入検査実施日	2019年1月21日 2月1日		
	上野崎1-10-15 入江ビル23F	納入検査実施者	IAT中村 インサービス 中村 大山			

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア・パッキン	✓	ハンドル開閉検出確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認
	✓	ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ		✓	電源スイッチの作動状態
	✓	ハンドルキズ・汚れ		✓	SDカードの挿入・取外性
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと
	✓	滅菌温度センサの汚れ		✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	✓	棚、トレーのキズ・汚れ		✓	本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。
	✓	缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性		✓	アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態
給水タンク	✓	給水タンクの内部汚れ	制御	✓	キズ・汚れ
	✓	水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない蓋の取付取外しに問題が無いか		✓	運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間)
	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認
排水タンク	✓	LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致	性能評価	✓	B&Dテスト実施 データログモード 134℃ OK 39',2
	✓	タンク内に汚れはないか		✓	リークチェックテスト (P1:2.12(-80.93kPa) P2:-80.45kPa P3:-80.54kPa)
	✓	フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		✓	0点調整
	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
スペース	✓	設置スペースの確保 右90×左50×背面75×天面250mm以上 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと	その他	✓	運転・お手入れ方法の説明
				✓	装置内運転時異音

特記事項



BMS-Test 石 STEAM

= データログモード OK