

《不具合対応報告書》

担当者: 廣瀬・小笠原

【発生日】 年 月 日
【対応日】 2019年 4月 24日
【連絡元】 ☐モリタ(担当者:)
 ☐ユーザー
 ☐その他()
【ユーザー名 & 県名】 埼玉県 あすなろデンタルケア

WD-150【機番:14060096】

IC Clave【機番: 】

【症状】

槽内温度低下

【対応方法】 ☐引取り修理(代替機no.)

■現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
 ☐その他()

【給水方法】 ■水

☐水 & お湯

【ラック種類】 ■標準ラック

☐ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【備考】

洗浄工程でエラー発生とのこと。

槽内空の状態洗浄工程クリア。上のスプレーノズルが器材に干渉し

温度センサーに当たっていなかったと思われる。

他確認事項: 単独操作で90℃まで上昇を確認。

念のため温度センサ間差2→9℃へ変更

※医院名が「あいゆう歯科」に変わっていた

【症状】

【対応方法】 ☐引取り修理(代替機no.)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
 ☐その他()

【給水方法】 ☐アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他()

【滅菌バッグ】 ☐ディスボ

☐リユース

【網の種類】 ☐トレイ棚

☐網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】