

株式会社IHIアグリテック
 環境プロジェクト部 サービスグループ
 〒704-8122
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL 086-944-6528
 FAX 086-942-9030

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

お客様	名称	入江歯科医院 様	製造番号	100350 (左側)	確認	通
	住所	埼玉県さいたま市浦和区上本郷1-10-15	納入日	2019年2月15日		
		入江ビル 2F	納入検査実施者	IAT 中村		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目	
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認 ドアLOCK位置確認	
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態	
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ	
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	ドア開閉時装置設置位置がずれないこと	
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	スペース	✓	装置設置スペースの確保 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと	
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	✓	運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認	
	✓	洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の濡れ		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認	
	✓	洗剤投入量の確認		✓	ラック仕様切換(ハントビースラック・標準ラック)	
	✓	ローラーポンプの動作確認		有・無	温水使用切換	
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	評価 価能	—	インジケータによる残渣判定(TOST)	
	✓	排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)		✓	周波数と設置ICWの一致	
	✓	お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水ノ湯逆配管NG)		✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付	
	✓	給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)		—	運転・お手入れ方法の説明	
	✓	給湯温度(45～50℃)		✓	装置内運転時異音・振動	
電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	運転 検査 結果	☐	良好	トシ
	✓	ディスプレイの色あせ・表示確認		☐	不良	
	✓	電源スイッチの作動状態				
	✓	SDカードの挿入・取外性				
	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと (漏電・熱注意)				
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ				

特記事項

- ・後日(2/26 9:30~)、ATP測定。
- ・100349 → 100350 新品入替。(左側)