

ウォッシャーディスインフェクター
IC Washer 設置報告書



株式会社HIIパワラ

機械事業本部 営業サービス部

〒704-8122岡山県岡山市東区西入新地170-6

NO. 00000

TEL(086)944-6528FAX (086)942-9030

お客様	名称	ひまわり歯科ささきクリニック	製造番号	100221	確認
	住所・TEL	栃木県鹿沼市府中町63-1	納入日	2017年 5月 12日	
	モリタ・営業所・担当TEL	担当 山口 様	納入検査・会社・実施者	菅田、中村	

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認・基準傾き内
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	制御	✓	運転プログラムの確認
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	性能評価	✓	入力・出力確認
	✓	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		✓	インジケータによる残渣判定(TOSI)
	✓	洗剤投入量の確認			
	✓	ローラーポンプの動作確認			
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	✓	付属品の確認
	✓	ジョイントLの取付状態、水漏れ 50HZ		✓	運転説明
				✓	装置内運転時異音・振動
電装系	✓	電源スイッチの作動状態	運転検査結果		異常無し
	✓	SDソケットの反応・汚れ			
	✓	行程表示LEDの点灯			
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

備考	数量	
ストレーナー	2個	
オリフィス	1個	50HZ付属品



株式会社IHI
機械事業本部 営業サービス部
〒704-8122
岡山県岡山市東区西大寺
TEL 086-944-6528
FAX 086-942-9030



クラスBオートクレーブ IC Clave 設置報告書

お客様	名称	ひまわり歯科ささきクリニック	製造番号	100248	ご確認	
	住所	栃木県鹿沼市府中町63-1	納入検査実施日	2017年 5月 12日		
			納入検査実施者	菅田,中村		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア・パッキン	✓	ハンドル開閉検出確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認
	✓	ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ		✓	電源スイッチの作動状態
	✓	ハンドルキズ・汚れ		✓	SDカードの挿入・取外性
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無		✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと
	✓	滅菌温度センサの汚れ		✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	✓	棚 1、トレイ 3キズ・汚れ	外装・設置	✓	本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。
	✓	缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性		✓	アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態
給水タンク	✓	給水タンクの内部汚れ		✓	キズ・汚れ
	✓	水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性	制御	✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない蓋の取付取外しに問題が無いか		✓	運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間)
	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認
	✓	LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致	性能評価	✓	B&Dテスト実施
排水タンク	✓	タンク内に汚れはないか		✓	リークチェックテスト
	✓	フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		✓	0点調整
	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)	その他	✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
スペース	✓	設置スペースの確保 右90×左50×背面75×天面250mm以上 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと		✓	運転・お手入れ方法の説明
				✓	装置内運転時異音

特記事項 特になし