

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2019 年 5 月 8 日

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer			
作業年月日	2019 年 3 月 22 日		作業時間: Hr
顧客名	谷塚藤波歯科医院 様	TEL: 048-929-0034	
所在地	埼玉県草加市谷塚1-5-11		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016 年 5 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100104	運転回数: 1460	運転回数リセット: ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・ エラー1 漏洩検出			
原因			
・ 循環水ライン、乾燥ライン樹脂継手亀裂による機体内部の水漏れ			
処置、作業内容			
・ 循環ライン・乾燥ライン樹脂継手交換			
・ 各種調整、清掃、運転動作確認			
特記事項			
・ ドア開閉ワイヤー改修作業実施 (別紙)			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・ 樹脂継手		一式		
2	・ ドア開閉対策部品		一式		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 5 月 10 日

ご署名 藤野 弘川 (印)

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環境PJ '19/03/22 富田	環境PJ '19/03/22 桐野