

医療機器の貸出に関する確認書

2019 年 4 月 10 日
返却確認日 年 月 日

貸出元 株式会社IHIAグリテック
所在地 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

貸出先 医療法人 入江歯科医院
所在地 〒330-0071 さいたま市若和区上木崎1-10-15 入江ビル
管理責任者 TEL 048-832-8131
氏名 理事長 入江 修 充



貸出目的

- ☐ デモ ☐ 臨床使用 ☐ 緊急時対応 ☒ 故障・修理対応 エラー!!
☐ 研修 ☐ 研究目的 ☐ 納期遅延対応 ☐ その他 ()

品名	数量	設置場所	期間	症例数
クラスBオートクレーブ Icclave シリアルno.(100189)	/	入江歯科医院様	2019.4.10 ~	X

●貸出期間中の費用負担:

1. 当該医療機器の設置
2. 撤去
3. 保守・修理費
4. 消耗品等
5. その他の費用

●貸出期間が満了した当該医療機器は、速やかに貸出元に返却する。

〈お取引先商店名〉

〈ご担当者名〉

- ・必要事項をご記入いただき、FAXにてご返信ください。確認書が到着後、弊社貸出予約受付完了となります。
- ・貸出品の在庫状況により商品の発送に時間を頂く場合がございますので、ご了承ください。
- ・先にFAXなどで貸出依頼、ご予約をされた場合につきましては、「医療機器の貸出に関する確認書」を、貸出機に同梱いたしますので、必要事項をご記入いただき、貸出機器の返却と一緒にご送付いただいても結構です。
- ・貸出機器の発送先はご要望があれば余白や別紙にて発送先をご指示頂ければ、ご対応いたします。ご要望が無い場合は、お取引店様へ発送させていただきます。

《不具合対応報告書》

担当者:廣瀬・小笠原

【発生日】 年 月 日
 【対応日】 2019年 4月 10日
 【連絡元】 ☐モリタ(担当者:)
 ☐ユーザー
 ☐その他()
 【ユーザー名&県名】 埼玉県 入江歯科医院

IC Washer【機番:100348】

【症状】

エラー16:槽内温度低下1
 ※90℃5分モード後の槽内洗浄消毒モードにて上記エラー発生

【対応方法】☐引取り修理(代替機no.)

■現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
 ☒その他()

【給水方法】☐水

■水&お湯

【ラック種類】☐標準ラック

■ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無 ※一部吸引管立て

《SUSフィルターの洗浄》 ☒有 ☐無

【備考】

- ・フィルター3清掃後、向きを90° 変更
- ・すすぎ1及び2を60s→120s
- ・加温限度時間300s→500s

※おそらくフィルター3のゴミ詰まりにより温度センサーに水が当たっていなかったためと考えられる。清掃、パラメータ変更後、試運転(槽内洗浄消毒)成功。

IC Clave【機番:100384】

【症状】

エラー11:蒸気発生器高温異常

【対応方法】☒引取り修理(代替機no.100189)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
 ☐その他()

【給水方法】☐アイオニー使用

■精製水購入

☐その他()

【滅菌バッグ】☐ディスボ

☐リユース

【網の種類】☐トレー棚

☐網バスケット

【ハンドピースの滅菌】☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】