

## 器具除染用洗浄機 IC Washer点検報告書

お客様用

|     |      |               |  |        |        |       |        |      |                                                                                     |  |
|-----|------|---------------|--|--------|--------|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| お客様 | 名称   | ほんま歯科医院様      |  | 製造番号   | 100139 | 点検実施日 | 2019.8 | ご承認印 |  |  |
|     | 住所   | 埼玉県さいたま市岩槻区本町 |  | 運転回数   | 3009   | 点検実施者 | 川本     |      |                                                                                     |  |
|     | 納入場所 | 3-20-03       |  | サービス形態 | 定期保守点検 |       | モニタ担当者 |      |                                                                                     |  |
|     |      |               |  |        |        |       |        |      |                                                                                     |  |

## ドア機能

- ☒ ドア開閉動作
- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ ドアフックの掛かり・押付け強さ
- ☒ ドア締め付けスイッチの作動
- ☒ インターロックの作動
- ☒ テンションスプリングの取付け・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア手動開放レバーの作動
- ☒ ドア開放スイッチONの際の開放量

## 薬剤ポンプ(洗剤・仕上剤)

- ☒ 薬剤レベルセンサー配線、配管取付
- ☒ 薬剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの作動
- ☒ 薬剤投入量
- ☒ 薬剤レベルセンサーの作動

## 乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取付け
- ☒ 乾燥ファンの作動・異音
- ☒ 乾燥ヒータの取付け状態・配線の劣化
- ☒ 乾燥ヒータの作動
- ☒ プレフィルタのつまり・汚れ
- ☒ HEPAフィルタのつまり・汚れ

## 配管系

- ☒ 外部給水・給湯配管の継手・ホースの損傷、漏れ
- ☒ 外部排水継手・ホースの損傷、漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 乾燥回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 給水弁の作動・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動・漏れ
- ☒ 水位圧カススイッチの取付け・漏れ
- ☒ 給水タンク・凝縮タンクの取付け・漏れ

## ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動・異音
- ☒ 凝縮排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 凝縮排水ポンプの作動・異音

## 洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れ
- ☒ 槽内LEDの点灯
- ☒ 洗浄アームの回転
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ → 交換済み、ヘタリあり
- ☒ 排水口フィルタの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒータの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取付け・汚れ

## 電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示
- ☒ 電源スイッチの作動
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続
- ☒ メモリーカードへの書き込み確認
- ☒ 圧力センサーの取付け
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色(加温・乾燥)

## 外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの固定・ゴムシートの設置
- ☒ 外装の汚れ・損傷
- ☒ 制御パネルカバーの汚れ・損傷

## 消耗品の交換

- ☒ ドアパッキン
- ☒ プレフィルタ
- ☒ HEPAフィルタ
- ☒ 洗剤・仕上剤ポンプチューブ

## 性能評価

- ☒ インジケーターによる残渣判定(TOSI)

## 運転確認

合 ・ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

| 交換部品     | 数量 |
|----------|----|
| ドアパッキン   | 1  |
| プレフィルタ   | 1  |
| HEPAフィルタ | 1  |
| DPIチューブ  | 2  |

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL: 086-944-6528

FAX: 086-942-9030