

IM-302

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

モリタ用
作業用
IHアグリテック

名前 お客様	飯田歯科医院	製造番号 様	14060100	点検実施日	2019年6月12日	ご承認印
住所	蕨市塚越1-5-12	運転回数	3,152回	点検実施者	中村(裕)	
納入場所		サービス形態	定期保守点検	モリタ担当部署	北関東支店	

計装(安全)

- 圧力計0点指示誤差
- ドア
- フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
- 開閉ハンドル取付け状態・動作確認 グリスアップ
- フック取付け状態・動作確認
- フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- ピス・ナット・ホーロー・セット増し締め
- ドアカバーの取り付け状態・割れ
- フック検出ユニット作動確認
- ドアロックユニット作動確認
- 蓋板のキズ・汚れ
- 開閉ハンドルの損傷確認
- 缶体
- 削れ・キズ・腐食・汚れの有無 消掃
- 殺菌温度センサの汚れ
- 網カゴの破損、汚れ
- 缶内ストレーナーの損傷・汚れ 消掃
- 配管系
- フジン樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- 給気弁の作動状態・漏れ
- 排蒸弁の作動状態・漏れ
- 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ストレーナーの汚れ
- 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- 安全弁(滅菌室)の漏れ
- 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- 大気圧検知圧カスイッチの作動状態・漏れ
- ラジエーターの取り付け状態・漏れ
- 蒸気発生器

- ソケット他溶接割れ・漏れ
- フランジパッキン漏れ
- ヒーター取り付け状態・漏れ
- 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- 水漏れ・異常音の確認
- 真空到速度 -94.0 kPa

給水タンク

- 給水タンクの損傷・漏れ 消掃
- 下部給水弁の漏れ
- 壺・取っ手の損傷・割れ
- フロートスイッチの作動状態・汚れ 消掃
- フロートスイッチの作動状態・汚れ 消掃

排水タンク

- ダンクの漏れ・汚れ 消掃
- フロートスイッチの作動状態・汚れ 消掃

電気系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 行程表示LEDの点灯
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各基板のコネクター緩み確認
- 端子の緩み・コネクターの接続確認
- 配線の変色・損傷有無・結束状態
- 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラーリー乾燥)

外装・設置

- 本体の水平確認・基準傾き内
- アジャスタフットの緩み・設置状態
- キズ・汚れ
- 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- 運転プログラムの確認
- 入力・出力確認
- 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ 変換
- エアーフィルターのつまり・汚れ

性能評価

- B&Dテスト実施
- ケミカルインジケーターによる判定
- リークチェック
- キャリブレーションの実施(温度・圧力)

インジケータ貼り付け



運転確認

<input checked="" type="radio"/> 合	否
------------------------------------	---

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は②を付ける。

交換部品(名称・型式)	数量
ドアパッキン	1

株式会社IHアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030