

株式会社IHIアグリテック  
環境プロジェクト部 サービスグループ  
〒704-8122  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL 086-944-6528  
FAX 086-942-9030

## ウォッシュシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

IHIシバウラ用

お客様	名称 くるみ歯科	製造番号 100413	二 種 認 定 記 入 手 引 書
	住所 群馬県高崎市井野町695-1	納入検査実施日 2019年12月23日	
		納入検査実施者 エムシーサービス(株) 安藤 善田	

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認 ドアLOCK位置確認
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタットの緩み・設置状態
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	ドア開閉時装置設置位置がずれないこと
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	スペース	✓	装置設置スペースの確保 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	✓	運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認
	✓	洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認
	✓	洗剤投入量の確認		△	ラック仕様切換(ハンドピースラック・標準ラック)
	✓	ローラーポンプの動作確認	有・無	温水使用切換	
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	評性 価能	✓	インジケーターによる残渣判定(TOSI)
	✓	排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・異気トラップ)		✓	周波数と設置ICWの一一致
	✓	お湯・水配管(供給状態に問題は無いか、水／湯逆配管NG)		✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
	✓	給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)		✓	運転・お手入れ方法の説明
電装系	△	給湯温度(45~50°C)		✓	装置内運転時異音・振動
	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	運転 検査 結果	<input checked="" type="checkbox"/> 良好	洗浄評価インジケーター TOSIを使用
	✓	ディスプレイの色あせ・表示確認		<input type="checkbox"/> 不良	
	✓	電源スイッチの作動状態			
	✓	SDカードの挿入・取外性			
	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと (漏電・熱注意)			
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

## 特記事項
