

点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 2019年 10月 2日

	ウォッシャーディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	2019 年 10 月 1 日		作業時間： Hr
顧客名	たのうえ歯科医院 様	TEL： 048-291-6480	
所在地	埼玉県川口市赤山1440-1	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2015 年 12 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 100061	運転回数：	運転回数リセット： ☐ 実施 ☒ 未実施
------	--------------	-------	---

不具合状況、依頼内容、異常履歴

原因

処置、作業内容

・ワイヤー交換

・各種調整、清掃、運転動作確認

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	扉ワイヤー		一式		
2	循環ポンプ		1		
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

〒333-0825埼玉県川口市赤山1440-1
たのうえ歯科医院
TEL048-291-6480 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者



ICW 扉開閉ワイヤー点検実施報告書

お客様 たのうえ歯科医院 御中 製造番号 100061
住所 埼玉県川口市赤山1440-1
点検日 2019年 10月 1日
点検時間 ~ 点検者 桐野

- ☒ 扉開閉ラインの交換
- ☒ エッジガードの追加
- ☒ 樹脂エルボの交換
- ☒ 最新プログラムへの書き換え
- ☒ 洗剤遅延検知時間の変更(60秒)
- ☒ 防水シートの追加
- ☒ 凝縮エア抜きパネルの交換
- ☒ U字金具によるシリコンシートの固定
- ☒ 漏洩センサー両面テープの交換
- ☒ 排水ポンプコンデンサーの端子保護

特記事項

お客様ご確認ご署名欄

〒333-0825埼玉県川口市赤山1440-1

たのうえ歯科医院

TEL048-291-6480

2019年 10 月 3 日

ご署名

印

本作業にて知れた個人情報、他の目的では使用いたしません。

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部
岡山県岡山市東区西大寺170-6
TEL (086)944-6528