

点検・修理報告書

管理 No

発行日: 2020年 2月12日

ウオッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2020 年 2 月 10 日 作業時間: Hr
顧客名	ワカバウォーク歯科 様 TEL: 049-271-0896
所在地	埼玉県鶴ヶ島市富士見1-2-1 ワカバウォーク2F ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2019 年 1 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100345	運転回数:	運転回数リセット: ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・運転中にシャットダウン			
原因			
・循環水ライン継手部より水漏れが発生。 水昇温ヒーター電源線にあたり、保護回路が作動。→シャットダウン。			
処置、作業内容			
・循環水ライン継手→対策品に交換 ・各種調整、清掃、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	循環水ライン継手対策品		1式		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020年 2月 13日

ご署名 小中-印 印

修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者

富田
20/02/10

桐野
20/02/10