

点検・修理報告書

管理 No. 19061
発行日: 2019年 11月 26日

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	2019年11月26日 作業時間: 8 Hr	
顧客名	医療法人 入江歯科医院 様	TEL: 0120-64-8035
所在地	埼玉県さいたま市浦和区上木崎1-10-15 入江ビル2F/3F	ご担当 須永 様
販売店	株式会社モリタ 北関東支店	ご担当 照井 様
納入年月日	2019 年 2 月 15 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シ-ル記入 ☐	
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100350	運転回数: 407回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・運転中の電源落ち。		
・ドアからの水漏れ。: 過去の対応履歴より。		
原因		
・ドアから漏れた水が漏電ブレーカにかかったため、漏電ブレーカが作動して電源が切れました。		
【水漏れの原因】①設置姿勢のずれによるドアからの水漏れ・②トレースタンドのドアへの干渉による水漏れ		
処置、作業内容		
・ドアから水が漏れた場合にも、漏電ブレーカに直接水が掛からない処置をいたしました。		
・設置時に再度設置の状態を確認・調整させていただきます。		
特記事項		
・器材がドアに干渉した場合、ドアから水が漏れることがあります。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019 年 12 月 4 日

ご署名 須永 光俊 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	萬田	桐野
'19/11/26	'19/11/26	'19/11/26