

お客様	名称	中津川歯科クリニック	製造番号	14080160	点検実施日2020/9/25	承認印
	住所	栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺2388-3	運転回数	2120	点検実施者HIAグリテックサービスGr	
	納入場所	同上	サービス形態	モリタ担当部署		

計装(安全)

レ	圧力計0点指示誤差
	ドア
レ	フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
レ	開閉ハンドル取付け状態・動作確認
レ	フック取付け状態・動作確認
レ	フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
レ	ビス・ナット・ボローセット増し締め
レ	ドアカバーの取り付け状態・割れ
レ	フック検出ユニット作動確認
レ	ドアロックユニット作動確認
レ	鑫板のキズ・汚れ
レ	開閉ハンドルの損傷確認

缶体

レ	割れ・キズ・腐食・汚れの有無
レ	滅菌温度センサの汚れ
レ	網力ゴの破損、汚れ
レ	缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

レ	フッソ樹脂チューブ・継手の損傷、漏れ
レ	シリコンチューブ・継手の損傷、漏れ
レ	給気弁の作動状態・漏れ
レ	排蒸弁の作動状態・漏れ
レ	真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
レ	滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
レ	ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
レ	ストレーナーの汚れ
レ	排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
レ	安全弁(滅菌室)の漏れ
レ	安全弁(蒸気発生器)の漏れ
レ	ダンプナーの漏れ・溶接割れ
レ	大気圧検知圧カススイッチの作動状態・漏れ
レ	ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸氣發生器

- レ ソケット他溶接割れ・漏れ
- レ フランジパッキン漏れ
- レ ヒーター取り付け状態・漏れ
- レ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- レ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- レ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

☐ 水漏れ・異常音の確認
☐ 真空到達度

給水タンク

レ	給水タンクの損傷・漏れ
レ	下部給水井の漏れ
レ	蓋・取っ手の損傷・割れ
レ	フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

レ	タンクの汚れ・漏れ
レ	フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

レ	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
レ	ディスプレイの色あせ・表示確認
レ	電源スイッチの作動状態
レ	行程表示LEDの点灯
レ	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
レ	各基板のコネクター緩み確認
レ	端子の緩み・コネクターの接続確認
レ	配線の変色・損傷有無・結束状態
レ	圧力センサーの取付け状態・入力確認
レ	ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

	本体の水平確認・基準傾き内(現地設置時)
	アジャスタフットの緩み・設置状態(現地設置時)
レ	キズ・汚れ
レ	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

レ	運転プログラムの確認
レ	入力・出力確認
レ	試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

レ	ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
レ	エアフィルターつまり、汚れ

性能評価

レ	ケミカルインジケータによる判定
レ	リークチェック

インジケータ貼り付け

■ ■ ■ ■ BMS-Test **STEAM**

運転確認

☒ 合 ・ ☐ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアバックシ	
修理交換部品 別紙	

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL: 086-944-6528

FAX:086-942-9030