

点検・修理報告書

管理 No. 20478
発行日: 2020/12/3

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer					
作業年月日	2020年11月24日			作業時間:	8 Hr
顧客名	鈴木歯科医院 様			TEL:	
所在地	茨城県結城市結城1168			ご担当	様
販売店				ご担当	様
納入年月日	年 月 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐				
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐				
装置情報	製造番号:	100093	運転回数:	1183回	
不具合状況、依頼内容、異常履歴					
・漏電ブレーカが作動し、電源が落ちた。					
原因					
・乾燥ヒーターが腐食し、絶縁不良状態でした。そのため、漏電により漏電ブレーカが作動したと考えられます。					
処置、作業内容					
・乾燥ファンも劣化が進んでおりましたので、蒸気ヒータと合わせて新品交換いたしました。					
・乾燥ラインに水が浸入しない対策を実施いたしました。					
特記事項					
・排水ポンプも劣化が進んでおりましたので、交換いたしました。					
・ドアから若干の水漏れが確認できましたので、対策いたしました。					
	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	乾燥ヒーター		2		
2	乾燥ファン		2		
3	排水ポンプ		1		
4	カム1		1		
5	カム2		1		
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		※送料・メンテナンスを含む
お客様ご確認署名欄					
年 月 日					
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。					
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。					
ご署名			鈴木博也 印		

修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	佐藤
20/12/3	20/12/3	20/12/3
池	田	藤

器具除染用洗浄機 IC Washer点検報告書

お客様	名称	鈴木歯科医院	様	製造番号	100093	点検実施日	2020年11月24日	承認印	鈴木
	住所	茨城県結城市結城1168		運転回数	1183	点検実施者	IHIアグリテック 佐藤		
	納入場所	同上		サービス形態	スポットメンテナンス	モリタ担当者	モリタ北関東支店		

ドア機能

- ☒ ドア開閉動作
- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ ドアフックの掛かり・押付け強さ
- ☒ ドア締め付けスイッチの作動
- ☒ インターロックの作動
- ☒ テンションスプリングの取付け・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア手動開放レバーの作動
- ☒ ドア開放スイッチONの際の開放量

薬剤ポンプ(洗剤・仕上剤)

- ☒ 薬剤レベルセンサー配線、配管取付
- ☒ 薬剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の濡れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの作動
- ☒ 薬剤投入量
- ☒ 薬剤レベルセンサーの作動

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取付け
- ☒ 乾燥ファンの作動・異音
- ☒ 乾燥ヒータの取付け状態・配線の劣化
- ☒ 乾燥ヒータの作動
- ☒ プレフィルタのつまり・汚れ
- ☒ HEPAフィルタのつまり・汚れ

配管系

- ☒ 外部給水・給湯配管の継手・ホースの損傷、漏れ
- ☒ 外部排水継手・ホースの損傷、漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 乾燥回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 給水弁の作動・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動・漏れ
- ☒ 水位圧カススイッチの取付け・漏れ
- ☒ 給水タンク・凝縮タンクの取付け・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動・異音
- ☒ 凝縮排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 凝縮排水ポンプの作動・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れ
- ☒ 槽内LEDの点灯
- ☒ 洗浄アームの回転
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷・つまり清掃
- ☒ フック接続ゴムブッシュのへたり・漏れ
- ☒ 排水口フィルタの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取付け・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示
- ☒ 電源スイッチの作動
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続
- ☒ メモリーカードへの書き込み確認
- ☒ 圧力センサーの取付け
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色(加温・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの固定・ゴムシートの設置
- ☒ 外装の汚れ・損傷
- ☒ 制御パネルカバーの汚れ・損傷

消耗品の交換

- ☒ ドアパッキン
- ☒ プレフィルタ
- ☒ HEPAフィルタ
- ☒ 洗剤・仕上剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケーターによる残渣判定(TOSI)

運転確認	
合	否



※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量
・洗剤ポンプ DPIチューブ	1
・仕上剤ポンプ DPIチューブ	1
・ドアパッキン一式	1
・HEPAフィルタ	1
・プレフィルタ	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-8030