

点検・修理報告書

管理 No. 20157

発行日: 2020年8月17日

クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2020 年 8 月 7 日	作業時間: 12 Hr
顧客名	医療法人社団 愛友会 上尾中央総合病院 歯科口腔外科 様	TEL: 048-777-2890
所在地	埼玉県上尾市柏座1-10-10	ご担当 道上 様
販売店	株式会社モリタ 北関東支店	ご担当 伊藤 様
納入年月日	2017 年 1 月 25 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品 —
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100194	運転回数: 4667回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラーNo.16 蒸気注入異常		
加温時に蒸気が注入されず、エラー発生しました。		
原因		
・電磁弁（蒸気弁）の閉塞により、蒸気が正常に注入されませんでした。		
処置、作業内容		
・電磁弁（蒸気弁）を交換しました。		
特記事項		
・定期点検が表示されておりましたので、点検作業を実施しました。（カウンターリセット済）		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		定期点検費用に含む
2	ドアパッキン		1		定期点検費用に含む
3					
4					
5					
		①.有償 ②.無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			定期保守点検費用（2回目）		
			合計		¥14,800

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

〒302-0588
 埼玉県上尾市柏座1丁目10番10号
 医療法人社団 愛友会 上尾中央総合病院
 電話 048-(773)1111

修理業者

株式会社IHアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
20/08/17	20/08/17	20/08/17

〒362-8588

埼玉県上尾市柏座1丁目10番10号

基法法人

社団愛友会

上尾中央総合病院

電話 048(773)1111(代)

クラスBオートクレーブ IC Clave点検報告書

お客様 お名前	名称	製造番号	点検 実施日	二重 封印
	住所	品番	点検 実施者	
	納入場所	サービス内容	モリク 担当者	

上尾中央総合病院 歯科材料科
埼玉県上尾市柏座1-10-10
10094
4667回
定期保守点検
2020.08.07
三宅
北原東・伊藤 様

計装(安全)

☒ 圧力計ゼロ設定

ドア

- ☒ ブラケットの腐蝕状況確認
- ☒ ドアカバーのねじ緩みの確認
- ☒ ドアセンサ作動確認
- ☒ ドアロックセンサ作動確認
- ☒ ドアロックピンの動きの確認
- ☒ 内装のキズ・汚れ
- ☒ 運転中のドアからの水漏れ

箱体

- ☒ 腐れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☒ 室内温度センサの汚れ
- ☒ トレー・扉・蓋・トレイ(網バスケット)の破損・汚れ
- ☒ 室内フィルタの破損・汚れ

配管系

- ☒ シリコンチューブ・継手の腐蝕・漏れ
- ☒ シリコンチューブ・継手の腐蝕・漏れ
- ☒ 排気弁の動作確認
- ☒ 排水弁の動作確認
- ☒ 真空・排気弁の動作確認
- ☒ 排気弁の動作確認(3方弁) → 閉塞時の交換
- ☒ 排水弁の動作確認(3方弁)
- ☒ 排水コネクタの腐れ・破損
- ☒ 安全弁(缶内)の腐れ
- ☒ 安全弁(高気圧室)の腐れ
- ☒ ラジエターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☒ ソケット他腐蝕・漏れ
- ☒ 蒸気発生器からの腐れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ サーモスタットの設定温度確認
- ☒ 給水ポンプの作動状態・腐蝕・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 真空到達速度(Pa)の確認

給水タンク

- ☒ 給水タンクの腐蝕・漏れ
- ☒ シリコンチューブの折れ・裂けの確認
- ☒ 浮子の腐蝕・漏れ
- ☒ フローセンサー(I)の作動確認
- ☒ フローセンサー(II)の作動確認

排水タンク

- ☒ タンクの腐れ・漏れ
- ☒ フロースイッチの作動確認

電気系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動確認
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 絶縁の検み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取り付け状態
- ☒ SD基板の腐食の確認

外装・設置

- ☒ 設置場所の水平確認
- ☒ 箱体のフロント面が正しいことの確認
- ☒ アジャスタの緩み・破損の確認
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☒ 運転プログラムのVerの確認および最新Verへの更新
- ☒ SDカードへの書き込みの確認

消耗品

- ☒ ドアパッキンの腐蝕・劣化・汚れ → 交換
- ☒ エアーフィルターのつまり・汚れ 参照(使用回数 16 回)

性能評価

- ☒ B&Dテスト実施
- ☒ コンパクトPCDによる検査
- ☒ T&Sバキューム
- ☒ 温度センサーの調整(VN調整)

運転確認	
全	否

インジケータ取り付け

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は②を付ける。

交換部品	数量
ドアパッキン	/
真空弁	/

株式会社IH|アグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-3

TEL:086-044-0520

FAX:086-942-0030