

器具除染用洗浄機 WD-150点検報告書

マリン用
作業車両
IHアグリテック用

お客様	名称	はら窓科選院	製造番号	14080140	点検実施日	2020/6/4	承認印	
	住所	栃木県小山市西城南6-95-7	運転回数	3484	点検実施者	菅田		
	納入場所		サービス形態	定期メンテナンス	実行担当部署			

ドア機能

- ☒ 開閉動作確認
- ☒ ドアバック目視点検
- ☒ ドアフックの掛かり・締め付け量確認
- ☒ ドア締め付けスイッチ作動確認
- ☒ インターロック動作確認
- ☒ テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け状態・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア緊急時開放スイッチ機能確認
- ☒ ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- ☒ 洗剤レベルセンサ配線・配管取付
- ☒ 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの動作確認
- ☒ 流量計の検出状態
- ☒ 洗剤投入の確認
- ☒ 洗剤レベルセンサーの作動確認

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取り付け状態
- ☒ 乾燥ファンの作動状態・異音
- ☒ 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- ☒ プレフィルターの汚れ
- ☒ メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

配管系

- ☒ ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- ☒ 外部給水・給湯配管の継ぎ手の損傷・漏れ
- ☒ 外部排水継ぎ手・ホースの潰れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動状態・漏れ
- ☒ RO水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 水位圧カスイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 凝縮期の取り付け状態・漏れ
- ☒ 乾燥エア回路逆支弁の作動状態・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動状態・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動状態・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- ☒ 槽内LEDが各工程色で点灯している
- ☒ 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのへたり・漏れ
- ☒ 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取り付け状態・汚れ

電線系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(加温・乾燥)
- ☒ SDカードの書き込み確認

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

消耗品 交換

- ☒ ドアバックの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルター(プレ)のつまり・汚れ
- ☒ エアフィルター(メイン)のつまり・汚れ
- ☒ 洗剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケータによる残渣判定(TOSI)

運転確認	
☒	否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
扉バックシム(下部) L=500	1
扉バックシム L=1500	1
HEPAフィルター	1
入口フィルター	1
DPIチューブASSY	2

株式会社IHアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-8

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030

製造廠	はし齒科医院		製造年		昭和17年	認定書
住所			製造所		14080/49	
工口	差		型名		WD-150 (手動)	材料
用途			型式		WD-150 (手動)	
泥		継杭		両料		無料

ご依頼内容・現象

定期メンテナンス

(ご依頼者様)

処置

☒部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)

☒各部増補め ☐分解・再セットアップ

☐グリスアップ ☒動作確認

☒点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)

☒性能検査立ち会い ☐試運転 ☒最終検査終了・異常なし

・漏れなし、

・洗淨バシ"7-9-(7051) OK、

・正常作動確認。

昭和三十九年四月

作業日	20	20	年	08	月	04	日
保形	1 検査 回路	2 接続 回路	3 接続 回路	4 点検 回路	5 点検	9 検査 回路	(摘要)
サース	1 周回	2 挿入	3 CM	4 医療機器			非常管理
作区	00 部品 検査	10 挿入 回路	11 回路 調整	20 点検 回路	30 点検 回路	40 点検 回路	50 コー ネル
	70 PR	72 取組 説明	73 改造	74 部品 挿入	75 下見	77 FC	80 アワ ター
							90 その他
受付	月	日	時	分			
到着時間	月	日	時	分			
作業完了	月	日	時	分			

[illegible]

1	基本・据付・点検・査検・	(見取書No.)	32,000
2	技術料	H × 名 ×	円
3	派遣料	80Km × 1 名 ×	100 円
4	宿泊費	泊 × 名 ×	円
5	諸経費		
6	Tos1		1,000

製品番	入力	製法技術者	校印
		菅田	

菅田

実施者

北関東

TEL

取扱業者 (請込先) (株) H19711707 (支店名) (ご担当者) (注文No)	特記事項 訂正分
--	-------------

料 金 内 訳		
⑬ A	部 品 代	19 860
⑭ B	技 術 料 等	41 000
⑮		

⑤	税別合計金額	60 860	
	消費税	6 086	

物品	976 99
数量	本館受託部に