

ICC IM-205-1

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部 サービスグループ
〒704-8122
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL 086-944-6528
FAX 086-942-9030

クラスBオートクレーブ IC Clave 設置報告書

お客様	名称	滝澤歯科医院 様	製造番号	300079	ご確認	滝澤 一文
	住所	埼玉県熊谷市中奈良691-1	納入検査実施日	2020.09.26 (エ)		
			納入検査実施者	(株)IHIアグリテック 宮下-中村		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア・パッキン	✓	ハンドル開閉検出確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認
	✓	ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ		✓	電源スイッチの作動状態
	✓	ハンドルキズ・汚れ		✓	SDカードの挿入・取外性
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無		✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと
	✓	減菌温度センサの汚れ		✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	✓	棚、トレーのキズ・汚れ	外装・設置	✓	本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。
	✓	缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性		✓	アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態
給水タンク	✓	給水タンクの内部汚れ		✓	キズ・汚れ
	✓	水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性	制御	✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない蓋の取付取外しに問題が無いか		✓	運転プログラムの確認(規定減菌温度・時間)
	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認
	✓	LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致	性能評価	✓	日&ロテスト実施 → デンタルモード 運転確認
排水タンク	✓	タンク内に汚れはないか		✓	リークチェックテスト T1: 245.50秒 / -80.7kPa T2: -80.52kPa T3: -80.24kPa
	✓	フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		✓	0点調整
	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)	その他	✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
スペース	✓	設置スペースの確保 右90×左50×背面75×天面250mm以上 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと		✓	運転・お手入れ方法の説明
				✓	装置内運転時異音

特記事項

- ・ 300043 → 300079 入替
- ・ デンタルモード: 58分49秒(結果⑧) 134.5℃ / 211.6kPa
- ■ ■ ■ コーポレートPCD120-0K.
- ・ 目録給水装置に使用。