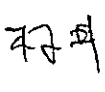


IM-302

器具除染用洗浄機 WD-150点検報告書

モリタ用
作業用
IH/Aグリテック用

お客様	名称	フリージア歯科	製造番号	14080151	点検実施日	2020年12月4日	ご承認印	
	住所	川越市吉田新町2-17-1	運転回数	2,261回	点検実施者	中村、鈴木		
	納入場所		サービス形態	定期保守点検	モリタ担当部署			

ドア機構

- ☒ 開閉動作確認
- ☒ ドアバック目視点検
- ☒ ドアフックの掛かり・締め付け量確認
- ☒ ドア締め付けスイッチ作動確認
- ☒ インターロック動作確認
- ☒ テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け状態・キズ 清掃
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ☒ ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- ☒ 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
- ☒ 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの動作確認
- ☒ 流量計の検出状態
- ☒ 洗剤投入の確認
- ☒ 洗剤レベルセンサーの作動確認

乾燥ユニット

- ☐ 乾燥ファンの取り付け状態
- ☐ 乾燥ファンの作動状態・異音
- ☐ 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- ☒ プレフィルターの汚れ
- ☒ メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

配管系

- ☒ ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- ☒ 外部給水・給湯配管の継ぎ手の損傷・漏れ
- ☒ 外部排水継ぎ手・ホースの漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動状態・漏れ
- ☒ RO水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 水位圧力スイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 凝縮期の取り付け状態・漏れ
- ☒ 乾燥エア回路逆止弁の作動状態・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動状態・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動状態・異音

洗浄槽

- ☐ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- ☐ 槽内LEDが各工程色で点灯している
- ☐ 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
- ☐ 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ☐ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ☐ 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- ☐ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☐ ヒーター過昇防止器の取り付け状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ 若干反りが鋭い
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(加温・乾燥)
- ☒ SDカードの書き込み確認

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ 清掃
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

消耗品

- ☒ ドアバックの損傷・劣化・汚れ 交換
- ☒ エアフィルター(プレ)のつまり・汚れ 交換
- ☒ エアフィルター(メイン)のつまり・汚れ 交換
- ☒ 洗剤ポンプチューブ 交換

性能評価

- ☒ インジケーターによる残渣判定(TOSI)

運転確認

合	・	否
---	---	---

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアバック上	1
ドアバック下	1
洗剤ポンプ内チューブ、仕上剤ポンプ内チューブ	2
プレフィルター	1
メインフィルター	1

株式会社IH/Aグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-8528

FAX:086-942-8030