

器具除染用洗浄機 WD-150点検報告書

モリタ用
作業用
IHIAグリテック用

お客様	名称	のぞみデンタルクリニック 様		製造番号	14060108	点検実施日	2021年2月25日	承認印	
	住所	寄居町大字桜沢1187-1		運転回数	1,893 回	点検実施者	中村		
	納入場所			サービス形態			モリタ担当部署		

ドア機能

- ☒ 開閉動作確認
- ☒ ドアパッキン目視点検
- ☒ ドアフックの掛かり・締め付け量確認
- ☒ ドア締め付けスイッチ作動確認
- ☒ インターロック動作確認
- ☒ テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け状態・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ☒ ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- ☒ 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
- ☒ 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの動作確認
- ☒ 流量計の検出状態
- ☒ 洗剤投入の確認
- ☒ 洗剤レベルセンサーの作動確認

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取り付け状態
- ☒ 乾燥ファンの作動状態・異音
- ☒ 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- ☒ プレフィルターの汚れ
- ☒ メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

配管系

- ☒ ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- ☒ 外部給水・給湯配管の継ぎ手の損傷・漏れ
- ☒ 外部排水継ぎ手・ホースの漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動状態・漏れ
- ☒ RO水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 水位圧カススイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 凝縮期の取り付け状態・漏れ
- ☒ 乾燥エア回路逆支弁の作動状態・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動状態・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動状態・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- ☒ 槽内LEDが各工程色で点灯している
- ☒ 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ☒ 排水口フィルターの汚れ・詰まり 清掃
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取り付け状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(加温・乾燥)
- ☒ SDカードの書き込み確認

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ 清掃
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルター(プレ)のつまり・汚れ
- ☒ エアフィルター(メイン)のつまり・汚れ
- ☒ 洗剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケーターによる残渣判定(TOSI)

運転確認

合	否
---	---

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎をつける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン上	1
ドアパッキン下	1
洗剤ポンプ内チューブ、仕上剤ポンプ内チューブ	2
プレフィルター	1
メインフィルター	1

清掃

株式会社IHIAグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030

C 作業報告書

お客様	のごみデニタルクリニック		様	ご承認印
住所	埼玉県寄居町大字桜沢1187-1			
TEL	098-501-6483 署名			
機種名	ウェッシャー・ディスプレイ79-			
型式	WD-150 (号機) 製造番号 14060108			
完了	継続	有料	無料	回数

ご依頼内容・現象	様
定期保守点検	(ご依頼者)
原因	
処置	☐ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい) ☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃 ☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認 ☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい) ☐ 性能検査立ち会い ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし 消耗品の交換。 点検表に基づく各部の点検。 TOSI と入力して運転。

お客様への伝言

作業日	20	21	年	2	月	25	日
保守形態	1. 保守契約	2. 性能点検	3. 性能点検	4. 点検整備	5. 点検	9. 対象外	(摘要)
サービス形態	1. 保守期間	2. スポット	3. CM	医療機器	区分	特管	非特管
作業区分	00. 製品販売	10. 納入設置	11. 現地調整	20. 定期点検	30. 性能検査	40. 点検	50. コール
	70. PR	72. 取扱説明	73. 改造	74. 部品納入	75. F見	77. FC	80. アフター
							90. その他
受付	月	日	時	分	時	分	分
到着時間	月	日	時	分	時	分	分
作業完了時刻	月	日	時	分	時	分	分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
T00201100	ト3パッキン上	1		1,050
T00201120	ト3パッキン下	1		790
T00203190	洗剤(仕上剤)7"	2	1,400	2,800
T00202300	プレフィル7-	1		520
T00202460	メインフィル9-	1		14,700

1	基本・据付(点検)・性検・	(見積書No.)	30,000
2	技術料	H × 名 × 円	
3	派遣料	90K × 1 名 × 100 円	9,000
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		3,000
6	高運代		2,420

責任技術者	検印	入力	納品書
実施者	中村		
サニエセンター	埼玉県SC	TEL	

取扱業者 (請求先)

(株) IHI 37 グリッパ

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

桑原 様

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売	TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074
エムシーサービス株式会社	TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074
長野SC 松本SC 上田SC 千代田SC 青森SC 岩手SC 秋田SC 山形SC 宮城SC 福島SC 茨城SC 栃木SC 群馬SC 埼玉SC 千葉SC 東京SC 神奈川SC 新潟SC 富山SC 石川SC 福井SC 山梨SC 長野SC 岐阜SC 愛知SC 三重SC 滋賀SC 京都SC 大阪SC 和歌山SC 奈良SC 徳島SC 高松SC 香川SC 愛媛SC 高知SC 佐賀SC 福岡SC 大分SC 熊本SC 鹿儿岛SC 沖縄SC	
洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト	〒386-0002 長野県上田市住吉280-8 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250
滅菌センター	〒387-0013 長野県千曲市小島3172 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116
福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム	
CARE メディカルケア株式会社	

料	金	内	訳
⑬ A	部品代	19	860
⑭ B	技術料等	44	420
⑮			

⑯	税別合計金額	64	280
	消費税	6	428

ご請求金額 ¥	70	708
---------	----	-----

納品書 No.	
---------	--