

点検・修理報告書

管理 No. 20943
発行日: 2021年4月9日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2021/3/30 作業時間: 8 Hr
顧客名	中村歯科医院 様
所在地	埼玉県行田市栄町12-10
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100321	運転回数: 1055回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・乾燥が悪い。水が残る減菌物が変色する。		
原因		
・本製品は、前方が少し上がった状態で使用します。これにより、缶内に残った水が吸引されやすくなります。		
若干傾斜が足りない状態でした。		
・真空ポンプの能力が落ちる原因として減菌時における器材の処理状況による部分の影響がございますので		
ご確認をお願い致します。		
処置、作業内容		
・アジャスタ高さを再調整しました。		
特記事項		
・設置時に傾斜を確認いたします。		

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
1. 有償 2. 無償		部品代 合計		
		技 術 料		
		出 張 料		
		合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

2021 年 4 月 9 日



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
21/04/07	21/04/07	21/04/07