

点検・修理報告書

管理 No.

20903

発行日:

2021年7月6日

機種/型式	クラスBオートクレープ BC-17				
作業年月日	2021 年 6 月 28 日			作業時間:	8 Hr
顧客名	水野歯科クリニック 様			TEL:	0493-62-7003
所在地	埼玉県比企郡嵐山町大字菅谷154-2			ご担当	様
販売店				ご担当	様
納入年月日	2015 年 8 月 11 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐				
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐				
装置情報	製造番号:	14090207	運転回数:	822 回	
不具合状況、依頼内容、異常履歴					
エラー30 缶体真空異常					
原因 ・ 真空ポンプ、ドアパッキンの劣化によるリーク					
処置、作業内容					
・ ドアパッキン、真空ポンプの交換					
・ ドアハンドル、給水タンクキャップの劣化による交換					
特記事項					
	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドアパッキン		1		
2	真空ポンプ		1		
3	ドアハンドル		1		
4	給水タンクキャップ		1		
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		※定期メンテナンスに含む
お客様ご確認署名欄 ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。					
			令和3年7月9日 水野 池		

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
 環境ソリューションBU サービスグループ
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 '21/06/28 池	環境PJサービスG '21/06/17 富田	環境PJサービスG '21/06/17 安田

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

R3 年 7 月 9 日

お客様	名称	水野歯科クリニック	製造番号	14090207	点検実施日	2021年6月28日	ご承認印	
	住所	埼玉県比企郡嵐山町大字菅谷154-2	運転回数	822	点検実施者	IHI物流産業システム サービスグループ		
	納入場所		サービス形態	スポットメンテナンス	モリタ担当部署	モリタ北関東支店		

計装(安全)

- ☒ 圧力計0点指示誤差
- ドア**
- ☒ フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
- ☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- ☒ フック取付け状態・動作確認
- ☒ フックパネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- ☒ ピス・ナット・ホーローセット増し締め
- ☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ
- ☒ フック検出ユニット動作確認
- ☒ ドアロックユニット動作確認
- ☒ 蓋板のキズ・汚れ
- ☒ 開閉ハンドルの損傷確認

缶体

- ☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☒ 滅菌温度センサの汚れ
- ☒ 網カゴの破損・汚れ
- ☒ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- ☒ フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ 給気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 排蒸弁の作動状態・漏れ
- ☒ 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- ☒ 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ストレーナーの汚れ
- ☒ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- ☒ 安全弁(滅菌室)の漏れ
- ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ☒ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- ☒ 大気圧検知圧カススイッチの作動状態・漏れ
- ☒ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☒ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☒ フランジパッキン漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ☒ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ☒ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 水漏れ・異音等の確認
- ☒ 真空到達度

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ 下部給水弁の漏れ
- ☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☒ 運転プログラムの確認
- ☒ 入力・出力確認
- ☒ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルター・つまり・汚れ

性能評価

- ☐
- ☒ ケミカルインジケータによる判定
- ☒ リークチェック
- ☐

インジケータ貼り付け



運転確認

合 ・ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
・ドアパッキン	1
・真空ポンプ	1

株式会社IHI物流産業システム
 環境ソリューションBU サービスグループ
 〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

【代替機】点検・修理依頼書

※スライド貸出厳禁！点検後、ベストな状態で貸出をすること！

依頼内容	点検
✓	修理

貸出先 水野歯科クリニック 様

案件番号

設置時の運転回数 2 回
回収時の運転回数 720 回

回収日 2021. 7. 9

回収者 青木 梨原 さん

機番 13100079

機種	ICC
	ICW
✓	BC-17
	WD-150

※記入時のお願い※
違和感がない場合を除き、詳しい情報を書き込むようにしてください。
(×)異音がある → (○)本体下部からこすれたような音がある
(×)水漏れがある → (○)全面左下のドアパッキン辺りから、じわりと水漏れがある

【給水方法】 ＜ICW・WD＞ ☐ 水 ☐ 水&温水	【設置場所】 ☒ 作業台上 ☐ その他 () ☐ シンク下
【ラック・バスケット種類】 ＜ICW・WD＞ ☐ 標準ラック ☐ ハンドピースラック ＜止水プラグ使用＞ 有 無 ＜SUSフィルター洗浄＞ 有 無	【その他特筆事項】 ・ E7-99 × 2
【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】 ☐ 単回使用 ☐ 複数回使用	
【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】 ☐ 有 ☐ 無	