

クラスBオートクレーブ IC Clave点検報告書

お客様	名称 上尾中央総合病院	製造番号 100194	点検 実施日 2021/6/23	ご承認印 
	住所 埼玉県上尾市柏座1丁目10番10	運転回数 1293	点検 実施者 山形	
	納入場所	サービス形態	モリタ 担当者	

#362-8588

埼玉県上尾市柏座1丁目10番10号

医療法人 上尾中央総合病院

社団法人 上尾市医師会

電話 048(773)1111(代)

計装(安全)

☒ 圧力計ゼロ設定

ドア

☒ ブラケットの溶接状況確認☒ ドアカバーのねじ緩みの確認☒ ドアセンサ作動確認☒ ドアロックセンサ作動確認☒ ドアロックピンの動きの確認☒ 内蓋のキズ・汚れ☒ 運転中のドアからの水漏れ

缶体

☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無☒ 缶内温度センサの汚れ☒ トレー棚・減菌トレー(網バスケット)の破損・汚れ☒ 缶内フィルタの損傷・汚れ

配管系

☒ テフロンチューブ・継手の損傷・漏れ☒ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ☒ 給気弁の動作確認☒ 排蒸弁の動作確認☒ 真空・排気弁の動作確認☒ 蒸気弁の動作確認(3方弁)☒ 回水弁の動作確認(3方弁)☒ 排水コネクタの漏れ・破損☒ 安全弁(缶内)の漏れ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ☒ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

☒ ソケット他溶接割れ・漏れ☒ 蒸気発生器からの漏れ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ☒ サーモスタットの設定温度確認☒ 給水ポンプの作動状態・異音・漏れ☒ ソケット他溶接割れ・漏れ☒ 蒸気発生器からの漏れ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ☒ サーモスタットの設定温度確認☒ 給水ポンプの作動状態・異音・漏れ

真空ポンプ

☒ 真空到達速度(P1)の確認

給水タンク

☒ 給水タンクの損傷・漏れ☒ シリコンチューブの折れ、裂けの確認☒ 垂の損傷・割れ☒ フロートセンサー(L)の作動確認☒ フロートセンサー(H)の作動確認

排水タンク

☒ タンクの汚れ・漏れ☒ フロートスイッチの作動確認

電装系

☒ タッチパネルの作動状態・キズ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認☒ 電源スイッチの作動状態☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ☒ 各基板のコネクター緩み確認☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認☒ SD基板の腐食の確認

外装・設置

☒ 設置場所の水平確認☒ 本体のフロント側が高いことの確認☒ アジャスタの緩み・破損の確認☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

☒ 運転プログラムのVerの確認および最新Verへの更新☒ SDカードへの書き込みの確認

消耗品

☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ☒ エアフィルターをつまみ、汚れ

性能評価

☒ B&Dテスト実施☒ コンパクトPCDによる判定☒ TESTバキューム☒ 温度センサーの調整(VR調整)

運転確認

☒ 合 ・ 否

インジケータ貼り付け

【     】

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量
ドアパッキン(同梱)	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030