

点検・修理報告書

管理 No. 210407

発行日: 2021年9月14日

IC Clave	
作業年月日	2021年9月6日 作業時間: 8 Hr
顧客名	内田歯科医院 様
所在地	TEL: 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 300113	運転回数: 680回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
1. エラー16 蒸気注入異常が発生した。		
2. エラー18 滅菌異常が発生した。		
3. エラー23 蒸気温度センサー異常が発生した。		
原因		
1. 真空弁に異物が詰まっており、リークしておりました。そのため、蒸気を注入しても温度が上がらず、エラー16が発生したと考えられます。		
2. 上記と同様、真空弁のリークにより、滅菌温度が保持できず、エラー18が発生したと考えられます。		
3. 蒸気温度センサーが故障しておりました。		
処置、作業内容		
1. 2. 真空弁の異物を除去し、洗浄しました。		
3. 蒸気温度センサーを交換しました。		
特記事項		
・ドアパッキンが劣化しておりましたので、交換しました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気温度センサー		1		
2	ドアパッキン		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 9 月 24 日

ご署名 藤 田 印

修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 21/09/14 池	小 21/09/14 山	山 21/09/14 本