

クラスBオートクレーブ IC Clave点検報告書

2021年10月20日

お客様	名称 幸町歯科口腔外科医院 住所 埼玉県志木市幸町1-12-16 納入場所 同上	機種 100267 運転回数 3216 回 サービス形態 定期保守点検	点検実施日 2021年9月24日 点検実施者 日研トータルソーシング㈱ モリタ担当者	承認印
-----	---	--	--	---------

計装(安全)

- 圧力計0点指示誤差
ドア
 フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
 フック取付け状態・動作確認
 フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
 ビス・ナット・ホーロー一セット増し締め
 ドアカバーの取り付け状態・割れ
 フック検出ユニット作動確認
 ドアロックユニット作動確認
 蓋板のキズ・汚れ

缶体

- 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
 滅菌温度センサの汚れ
 トレー棚・滅菌トレー(網/バスケット)の破損、汚れ
 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- フッソ樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
 シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
 給気弁の作動状態・漏れ
 排蒸弁の作動状態・漏れ
 真空・乾燥弁の作動状態漏れ
 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
 ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
 ストレーナーの汚れ
 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
 安全弁(滅菌室)の漏れ
 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
 ダンプナーの漏れ・溶接割れ
 大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ
 ラジエターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ソケット他溶接割れ・漏れ
 フランジパッキン漏れ
 ヒーター取り付け状態・漏れ
 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- 水漏れ・異常音の確認
 真空到達度

給水タンク

- 給水タンクの損傷・漏れ
 下部給水弁の漏れ
 蓋・取っ手の損傷・割れ
 フロートスイッチの作動状態・漏れ

排水タンク

- タンクの汚れ・漏れ
 フロートスイッチの作動状態・漏れ

電装系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
 ディスプレイの色あせ・表示確認
 電源スイッチの作動状態
 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
 各基板のコネクター緩み確認
 端子の緩み・コネクターの接続確認
 配線の変色・損傷有無・結束状態
 圧力センサーの取付け状態・入力確認
 ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- 本体の水平確認・基準傾き内
 アジャスタフットの緩み・設置状態
 キズ・汚れ
 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- 運転プログラムの確認
 入力・出力確認

消耗品

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
 エアーフィルターのつまり、汚れ

性能評価

- B&Dテスト実施
 ケミカルインジケーターによる判定
 リークチェック
 キャリブレーションの実施(温度・圧力)

運転確認	
<input checked="" type="radio"/> 合	- 否

インジケータ貼り付け



※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は○を付ける。

交換部品	数量
ドアパッキン	1
圧力センサー	1
排気弁	1

株式会社IHI物流産業システム

環境ソリューションBU サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL: 086-944-6528

FAX: 086-942-9030