

点検・修理報告書

管理 No. 20xxx
発行日: 2021/4/16

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer					
作業年月日	2021年4月2日			作業時間:	8 Hr
顧客名	おかみつ歯科クリニック 様			TEL:	04-2937-4822
所在地	埼玉県所沢市緑町4-15-23			ご担当	様
販売店				ご担当	様
納入年月日	2018 年 2 月 8 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回 目	定期点検シール記入 ☐			
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐			
装置情報	製造番号:	100303	運転回数:	783回	
不具合状況、依頼内容、異常履歴					
1. エラー 1 漏洩検出異常が発生した。					
2. エラー 2 洗浄槽満水異常が発生した。					
原因					
1. 乾燥ラインの配管継手からの漏えいが確認できました。ここから水が漏えいし、エラー 1 が発生したと考えられます。					
2. エラー 1 が発生したときに、排水処理が完全に終了する前に電源を切り、再度運転を開始したと考えられます。水が残っている状態で運転したために、洗浄槽の水位が上がり、エラー 2 が発生したと考えられます。					
処置、作業内容					
・漏えい個所の部品を交換しました。					
特記事項					
・カム 1, 2, 乾燥ヒーター、ファンも交換いたしました。					
	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	カム 1		1		
2	カム 2		1		
3	乾燥ヒーター		1		
4	ファン		1		
5	配管継手		1		
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		※定期メンテナンスに含む
お客様ご確認署名欄					
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。					
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。					
R2 年 6 月 21 日					
ご署名 岡光史洋 印					
修理業者		株式会社IHIアグリテック		品証	責任技術者
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6				菊	高
				佐	

器具除染用洗浄機 IC Washer点検報告書

2021年6月21日

お客様様	名称	おかみつ歯科クリニック 様	製造番号	100303	点検実施日	2021年4月2日	ご承認印	
	住所	埼玉県所沢市緑町4-15-23	運転回数	783	点検実施者	㈱IHIアグリテック		
	納入場所	同上	サービス形態	定期保守点検	モリタ担当			

ドア機能

- ☒ ドア開閉動作
- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ ドアフックの掛かり・押付け強さ
- ☒ ドア締め付けスイッチの作動
- ☒ インターロックの作動
- ☒ テンションスプリングの取付け・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア手動開放レバーの作動
- ☒ ドア開放スイッチONの際の開放量

薬剤ポンプ(洗剤・仕上剤)

- ☒ 薬剤レベルセンサー配線、配管取付
- ☒ 薬剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの作動
- ☒ 薬剤投入量
- ☒ 薬剤レベルセンサーの作動

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取付け
- ☒ 乾燥ファンの作動・異音
- ☒ 乾燥ヒータの取付け状態・配線の劣化
- ☒ 乾燥ヒータの作動
- ☒ プレフィルタのつまり・汚れ
- ☒ HEPAフィルタのつまり・汚れ

配管系

- ☒ 外部給水・給湯配管の継手・ホースの損傷、漏れ
- ☒ 外部排水継手・ホースの損傷、漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 乾燥回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 給水弁の作動・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動・漏れ
- ☒ 水位圧カススイッチの取付け・漏れ
- ☒ 給水タンク・凝縮タンクの取付け・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動・異音
- ☒ 凝縮排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 凝縮排水ポンプの作動・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れ
- ☒ 槽内LEDの点灯
- ☒ 洗浄アームの回転
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ☒ 排水口フィルタの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒータの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取付け・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示
- ☒ 電源スイッチの作動
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続
- ☒ メモリーカードへの書き込み確認
- ☒ 圧力センサーの取付け
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色(加温・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの固定・ゴムシートの設置
- ☒ 外装の汚れ・損傷
- ☒ 制御パネルカバーの汚れ・損傷


消耗品の交換

- ☒ ドアパッキン
- ☒ プレフィルタ
- ☒ HEPAフィルタ
- ☒ 洗剤・仕上剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケータによる残渣判定(TOSI)

運転確認	
合	否

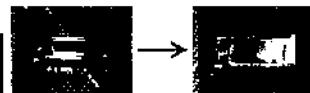

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量
・洗剤ポンプ DPIチューブ	1
・仕上剤ポンプ DPIチューブ	1
・ドアパッキン一式	1
・HEPAフィルタ	1
・プレフィルタ	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL 086-844-6500