

点検・修理報告書

管理 No. 210006

発行日: 8月18日

IC Clave	
作業年月日	2021年6月17日 作業時間: 8 Hr
顧客名	うりた歯科医院 様 TEL: 048-299-2221
所在地	埼玉県川口市安行藤八456 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2017 年 11 月 15 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100282	運転回数: 2284回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・ 大量の水漏れ（缶内内部より）		
・ 運転時異音		
・ 蒸気噴出		
原因		
・ 缶内用安全弁が規定圧力よりも少し低い圧力でリリースしておりました。その時に、缶内の蒸気を排出したため、温度を上昇させるために蒸気を追加注入しました。これにより、水の過補給となり、水が残留したと考えられます。		
・ 蒸気の噴出は安全弁のリリースによるものです。		
・ 運転時の異音は、安全弁のリリース時に発生した音です。		
処置、作業内容		
・ 缶内用安全弁を交換いたしました。		
・ 各種調整、清掃、運転動作確認を実施しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	缶内用安全弁		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021年 8 月 24 日

ご署名 山田 隆一郎 印

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 '21/08/18 池	小 '21/08/18 山	菊 '21/06/17 池