

点検・修理報告書

管理 No. 210385

発行日: 8月26日

IC Clave	
作業年月日	2021年8月23日 作業時間: 8 Hr
顧客名	中村歯科医院 様 TEL:
所在地	埼玉県行田市栄町12-10 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☒ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100321	運転回数: 1151回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
1. ハンドルが緩い。		
2. 缶内に圧力が残っているという表示が出る。		
原因		
1. ハンドルが緩く、シール性も悪化していることが確認されました。ハンドルの硬さ調整不良と考えられます。		
2. 缶内フィルターが汚れていると、抵抗が大きくなり、運転終了後に温度が低下し圧力が下がると、 少し負圧になる場合があります。		
処置、作業内容		
1. ハンドルの固さ調整をいたしました。		
2. 缶内フィルターを清掃いたしました。		
特記事項		
・排気弁にうなり音が発生しておりましたので、交換しました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	排気弁		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

埼玉県行田市栄町12-10 日

医療法人中村歯科医院

理事長 中村 宏之 印

修理業者 株式会社 I H I 物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	山本
'21/8/24	'21/8/24	'21/8/24

種別
SSo

出張作業報告書

②お客様控

コード 03288165	2021.08.27 *		整理No
お客様名 医療法人中村歯科医院	受付No 810069	受付日 21.08.26	受付時刻 09:20
ご住所 埼玉県行田市栄町12-10 048-553-1580 (〒361-0071)	品名 IC_CLAVE	機種 #ICCLAVE	部コード 5PKG
ご販売店様	製番 100321	保証 有 無	販売日 21.02.05
(受付内容) ICオートクレープ代替え機入れ替え設置作業 IHI物流産業システム様同行サポート		出張日 21.08.30 出張開始時刻 10:00 作業開始時刻 12:00 作業完了時刻 13:00 技術員 106950 杉田	
(作業内容) 代替機スチ設置作業 実施致し		ご確認 修理時カウンター ジャムカウンター グループ請求区分 契約区分 作業区分 現象 原因 (備考)	
使用部品明細	品番	品名	数量
コピット			
バックシート			
毎度ありがとうございます。 ご依頼の作業につき上記の内容にて完了致しましたので ご報告します。 ※万一3ヶ月以内に同一症状の故障が発生した場合は、本書をご提示ください。 同一原因である場合は、無料にて修理させていただきます。 修理についてのお問い合わせは右記をお願いします。			
作業部門	シャープマーケティング ジャパン株式会社 埼玉技術センター 修理受付窓口：0570-006008		