

器具除染用洗浄機 IC Washer点検報告書

2021年8月27日

お客様	名称	マチダデンタルオフィス 様	製造番号	100331	点検実施日	2021年8月5日	承認印	
	住所	埼玉県上尾市西宮下4-354-1	運転回数	1012/2150	点検実施者	株式会社IHI物流産業システム		
	納入場所		サービス形態		モリタ担当者			

ドア機能

- ☒ ドア開閉動作
- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ ドアフックの掛かり・押付け強さ
- ☒ ドア締め付けスイッチの作動
- ☒ インターロックの作動
- ☒ テンションスプリングの取付け・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア手動開放レバーの作動
- ☒ ドア開放スイッチONの際の開放量

薬剤ポンプ(洗剤・仕上剤)

- ☒ 薬剤レベルセンサー配線・配管取付
- ☒ 薬剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの作動
- ☒ 薬剤投入量
- ☒ 薬剤レベルセンサーの作動

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取付け
- ☒ 乾燥ファンの作動・異音
- ☒ 乾燥ヒータの取付け状態・配線の劣化
- ☒ 乾燥ヒータの作動
- ☒ プレフィルタのつまり・汚れ
- ☒ HEPAフィルタのつまり・汚れ

配管系

- ☒ 外部給水・給湯配管の継手・ホースの損傷・漏れ
- ☒ 外部排水継手・ホースの損傷・漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 乾燥回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 給水弁の作動・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動・漏れ
- ☒ 水位圧カスイッチの取付け・漏れ
- ☒ 給水タンク・凝縮タンクの取付け・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動・異音
- ☒ 凝縮排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 凝縮排水ポンプの作動・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れ
- ☒ 槽内LEDの点灯
- ☒ 洗浄アームの回転
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ☒ 排水口フィルタの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取付け・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示
- ☒ 電源スイッチの作動
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続
- ☒ メモリーカードへの書き込み確認
- ☒ 圧力センサーの取付け
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色(加温・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの固定・ゴムシートの設置
- ☒ 外装の汚れ・損傷
- ☒ 制御パネルカバーの汚れ・損傷

性能評価

- ☒ インジケータによる残渣判定(TOSI)

運転確認

合 ・ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量
ドアパッキン上下	1
薬剤ポンプ内チューブ	2
HEPAフィルター	1
プレフィルター	1

【代替機】点検・修理依頼書

※スライダ貸出厳禁！点検後、ベストな状態で貸出をすること！

依頼内容	点検
	修理

貸出先	マキタデンタルオプス(埼玉)様	
設置時の運転回数	100331	回
回収時の運転回数	502	回

案件番号	
回収日	2021. 8. 27
回収者	橋本 MC 野村

機種	ICW
	ICW
	BC-17
	WD-150

機番	100034
----	--------

※記入時のお願い※
違和感がない場合を除き、詳しい情報を書き込むようにしてください。
(X) 異音がある → (O) 本体下部からこすれたような音がある
(X) 水漏れがある → (O) 全面左下のボアパッキン辺りから、じわりと水漏れがある

【給水方法】

- <ICW,WD>
☐ 水
☒ 水&温水

- <ICW,WD>
☐ 生成器
☐ (アイオニー・精製水購入)

【設置場所】

- ☐ 作業台上
☒ シンク下
☐ その他 ()

【その他特筆事項】

・エラーなし

(手動停止1件あり)

【ラック・バスケット種類】

- <ICW,WD>
☒ 標準ラック
☐ ハンドピースラック
☐ 止水プラグ使用
☐ SUSフィルター洗浄
☐ 有
☐ 無

【滅菌バッグ(ICW・BC対応時のみ)】

- ☐ 単回使用
☐ 複数回使用

【ハンドピースの滅菌(ICW・BC対応時のみ)】

- ☐ 有
☐ 無