

ニッパ内科クリニック御中

点検確認書

株式会社 IH シバウラ
環境事業部

点検担当者: 佐藤 匠

点検年月日	23年5月10日	機種名	ONW-10	製造機番	1420
設置場所	内科診療室			TEL	0255-283-8100
納入時期	19年10月1日	使用回数		御対応者	佐藤 匠

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	✓	交換	□
ファルタリセット釦	正常	✓	交換	□
運転/停止釦	正常	✓	交換	□
アルコールモード釦	正常	✓	交換	□
リゾノ類				
操作パネル	正常	✓	交換	□
蛍光灯	正常	✓	交換	□
洗浄動作				
フタロック	正常	✓	調整	□
給水	正常	✓	調整	□
細管洗浄 順方向	正常	✓	調整	□
細管洗浄 逆方向	正常	✓	調整	□
細管洗浄 エアバージ	正常	✓	調整	□
アルコールフラッシュ	正常	✓	調整	□
オゾン分解フアン	正常	✓	調整	□
排水	正常	✓	調整	□
異常音、振動	正常	✓	調整	□
性能確認				
オゾン水濃度	正常	□	濃度:	mg/L
オゾンインジケータ	正常	✓		
酸素発生	正常	✓	濃度: 93.5 %	流量: 0.8 L/min
水漏れ確認	正常	✓	圧力:	170 MPa
装置外	正常	✓	調整	□
装置内	正常	✓	調整	□
清掃				
外装	正常	✓	清掃	□
内部	正常	✓	清掃	□
洗浄コネクタ	正常	✓	調整	□
洗浄チューブ	正常	✓	調整	□

交換部品	数量	コメント
吸着筒	交換 1式	
吸湿筒	交換 1式	
ドレン用ファルタ	交換 1個	
オゾン分解触媒	交換 1個	

23年5月10日
署名: 佐藤 匠

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。



内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社HINパウラ
環境事業部

日付: 2011/5/10 作業者 佐藤 匠
ONW-10機番: 1420 PSA機番: SPS- 客先: こうめ内科クリニック 様

定期交換部品	
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-)	合/ ☒ 否
ドレン用フィルターを交換したか	☒ 合/ 否
排水シリコンチューブを交換したか	合/ ☒ 否
オゾン分解触媒を交換したか	☒ 合/ 否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	☒ 合/ 否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	合/ 否
PSA性能確認	
圧カススイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	☒ 合/ 否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後) (90%以上)	(43.5 %) ☒ 合/ 否
酸素流量は適切か (0.73~0.82L/min)	(0.80 L/min) ☒ 合/ 否
PSA圧力の確認 (99 Mpa) ~ (170 Mpa)	参考値
外装の取付	
オゾンセンサーは配線したか	合/ ☒ 否
フロントパネルのランプは配線したか	☒ 合/ 否
フロントパネルとサイドパネルの間隔は均等か	☒ 合/ 否
ドレンチューブは接続したか	☒ 合/ 否
確認事項	
フタ・ピッキンに剥がれはないか	☒ 合/ 否
内視鏡接続コネクタのピッキン、オリングは正常か	☒ 合/ 否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルターは清掃したか(汚れある場合清掃)	☒ 合/ 否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	☒ 合/ 否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルターリセットスイッチ20秒長押し)	☒ 合/ 否
別紙 点検確認書に記録したか	☒ 合/ 否
確認試験	
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	☒ 合/ 否
運転は正常か、エラーはでないか	☒ 合/ 否
インジケータの変色は良好か	☒ 合/ 否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)