

小林医院 御中

点検確認書

株式会社 IHシパウラ
環境事業部

点検担当者: 佐藤 広

点検年月日	23年5月10日	機種名	ONW-10	製造機番	402
設置場所	内科検査室			TEL	055-241-5293
納入時期	19年11月9日	使用回数		御対応者	

点検項目	点検結果	
スイッチ類		
電源釦	正常 ☒	交換 ☐
フイルタリセット釦	正常 ☒	交換 ☐
運転/停止釦	正常 ☒	交換 ☐
アルコールモード釦	正常 ☒	交換 ☐
ランプ類		
操作パネル	正常 ☒	交換 ☐
蛍光灯	正常 ☒	交換 ☐
洗浄動作		
フタロック	正常 ☒	調整 ☐
給水	正常 ☒	調整 ☐
細管洗浄 順方向	正常 ☒	調整 ☐
細管洗浄 逆方向	正常 ☒	調整 ☐
細管洗浄 エアバージ	正常 ☒	調整 ☐
アルコールフラッシュ	正常 ☒	調整 ☐
オゾン分解ファン	正常 ☒	調整 ☐
排水	正常 ☒	調整 ☐
異常音、振動	正常 ☒	調整 ☐
性能確認		
オゾン水濃度	正常 ☒	濃度: mg/L
オゾンインジケータ	正常 ☒	
酸素発生	正常 ☐	濃度: 92.4% 流量: 0.82 L/min 圧力: MPa
水漏れ確認		
装置外	正常 ☒	調整 ☐
装置内	正常 ☒	調整 ☐
清掃		
外装	正常 ☒	清掃 ☐
内部	正常 ☒	清掃 ☐
洗浄コネクタ	正常 ☒	調整 ☐
洗浄チューブ	正常 ☒	調整 ☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	一式
吸湿筒	交換 ☐	一式
ドレン用フイルタ	交換 ☒	一個
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個

23年5月10日
甲府市小瀬町3-4
ご医療法人 陽明会 小林医院
医師 小林 章一

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社HJBパウラ
環境事業部

日付: 2011/5/10 作業者 田中 隆之
ONW-10機番: 402 PSA機番: SPS- 客先: 小井田 医院

様

定期交換部品

吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-)	合/否
ドレン用フィルターを交換したか	合/否
排水シリコンチューブを交換したか	合/否
オゾン分解触媒を交換したか	合/否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	合/否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	合/否

PSA性能確認

圧カスイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	合/否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後) (90%以上)	合/否
酸素流量は適切か (0.73~0.82L/min)	合/否
PSA圧力の確認 (98 Mpa) ~ (168 Mpa)	参考値

外装の取付

オゾンセンサーは配線したか	合/否
フロントパネルのランジは配線したか	合/否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	合/否
ドレンチューブは接続したか	合/否

確認事項

フタ・ピッキンに剥がれはないか	合/否
内視鏡接続コネクタのピッキン、オリングは正常か	合/否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルターは清掃したか(汚れある場合清掃)	合/否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	合/否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルターセットスイッチ20秒長押し)	合/否
別紙 点検確認書に記録したか	合/否

確認試験

オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	合/否
運転は正常か、エラーはでないか	合/否
インジケータの変色は良好か	合/否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)