

稲田クリーニング 御中

点検確認書

株式会社 IHシパウラ
環境事業部

点検担当者: 佐藤

点検年月日	23年10月20日	機種名	ONW-10	製造機番	1077
設置場所				TEL	
納入時期	19年9月29日	使用回数		御対応者	

点検項目	点検結果				
スイッチ類					
電源釦	正常 ☒	交換	☐		
フイルタリセット釦	正常 ☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常 ☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常 ☒	交換	☐		
ラゾノ類					
操作パネル	正常 ☒	交換	☐		
蛍光灯	正常 ☒	交換	☐		
洗浄動作					
フタロック	正常 ☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常 ☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常 ☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常 ☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアバージ	正常 ☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常 ☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解フアン	正常 ☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常 ☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常 ☒	調整	☐	交換	☐
性能確認					
オゾン水濃度	正常 ☒	濃度:	mg/L		
オゾンインジケータ	正常 ☒				
酸素発生	正常 ☒	濃度: 96.1%	流量: 0.82 L/min	圧力: 101~180 MPa	
水漏れ確認					
装置外	正常 ☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常 ☒	調整	☐	交換	☐
清掃					
外装	正常 ☒	清掃	☐		
内部	正常 ☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常 ☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常 ☒	調整	☐	交換	☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☒	一式	
吸湿筒	交換 ☒	一式	
ドレン用フイルタ	交換 ☒	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☒	一個	

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日
稲田クリーニング
ご署名 佐藤 小沼

日付: 23年10月20日 作業者 田中 尚
ONW-10機番: 1077 PSA機番: SPS- 客先: 和信(エフ)ニッパ 様

定期交換部品	
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-10688)	☒ 合 / ☐ 否
ドレン用フィルターを交換したか	☒ 合 / ☐ 否
排水シリコンチューブを交換したか	☒ 合 / ☐ 否
オゾン分解触媒を交換したか	☒ 合 / ☐ 否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	☒ 合 / ☐ 否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付いているか	☒ 合 / ☐ 否
PSA性能確認	
圧カスイッチのゼロ点は合っているか (±0.005Mpa以内)	☒ 合 / ☐ 否
酸素濃度の確認(運転開始から約3分後)(90%以上)	(94.1) % ☒ 合 / ☐ 否
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min)	(0.82) L/min ☒ 合 / ☐ 否
PSA圧力の確認 (10 / Mpa) ~ (186 Mpa)	参考値
外装の取付	
オゾンセンサーは配線したか	☒ 合 / ☐ 否
フロントパネルのラジエーターは配線したか	☒ 合 / ☐ 否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	☒ 合 / ☐ 否
ドレンチューブは接続したか	☒ 合 / ☐ 否
確認事項	
フタパッキンに剥がれはないか	☒ 合 / ☐ 否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	☒ 合 / ☐ 否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルターは清掃したか(汚れある場合清掃)	☒ 合 / ☐ 否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	☒ 合 / ☐ 否
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルターセットスイッチ20秒長押し)	☒ 合 / ☐ 否
別紙 点検確認書に記録したか	☒ 合 / ☐ 否
確認試験	
オゾン水濃度の確認(オゾン水インジケータで0.3mg/L以上)	☒ 合 / ☐ 否
運転は正常か、エラーはでないか	☒ 合 / ☐ 否
インジケータの変色は良好か	☒ 合 / ☐ 否

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)