

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成25年10月24日

機種名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号：100304
作業年月日	平成25年10月24日		作業時間： 1 Hr
顧客名	丸谷医院		TEL：0269-26-0077
所在地	長野県中野市大字片塩465-1		担当：院長先生 様
販売店	(有) 長野医科器械		担当：藤原 様
納入年月日	平成23年10月27日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1年 1回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常なし

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 448
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常なし

装置 情報	交換後運転回数：124	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌：18	殺菌+7L：227
	リークチェック：1	自己洗浄：27	7L単独：0	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手（本体側）		☒	1
排水栓		☒	1	コネクタ継手（コネクタ側）		☒	1
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

〒383-0046 長野県中野市大字片塩465-1

医療法人 丸谷医院

ご署名 理事長 丸谷和洋

TEL (0269) 26-0077

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者 佐藤 25.10.24	作業者 佐藤 25.10.24
----------------------	--------------------