

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成26年1月17日

機種名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100305	
作業年月日	平成26年1月17日		作業時間	1 Hr	
顧客名	天竜河畔医院		TEL	0265-72-2205	
所在地	長野県伊那市御園147番地		担当	院長先生 様	
販売店	(株)石川医科器械店		担当	岩崎 様	
納入年月日	平成24年1月20日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐		定期点検シール記入 ☒		
☒ 出張 ☐ 引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
異常なし			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハルス数 676
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常なし			

装置 情報	交換後運転回数	164	更新（リセット）	☒ 実施 ☐ 未実施	殺菌	157	殺菌+アル	179
	リークチェック	0	自己洗浄	2	アルコール単独	0	エア単独	0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手（本体側）		☒	
排水栓		☒	1	コネクタ継手（コネクタ側）		☒	
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	平成26年1月17日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 向山 勉	

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店 長野県松本市高宮東5-13 TEL : 0263-24-2840	責任技術者	作業者
		