



株式会社IMI

機械事業本部 営業サービスグループ
〒704-8122

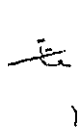
岡山県岡山市東区西大寺新地10-6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

作業者用

お客様	名称	プレミアムタウン歯科クリニック	製造番号	100145	ご確認	
	住所	千葉県成田市加良部1-1-48	納入日	2016.7.28		
		0476-27-4114	納入検査実施者	エムシーサービス(株) 小泉		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目	
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認 ドアLOCK位置確認	
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態	
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ	
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	ドア開閉時装置設置位置がずれないこと	
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態		スペース	✓	装置設置スペースの確保 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御		✓	運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認
	✓	洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ			✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認
	✓	洗剤投入量の確認			⓪	ラック仕様切換(ハントピースラック・標準ラック)
	✓	ローラーポンプの動作確認			⓪	温水使用切換
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	評価機能	✓	インジケーターによる残渣判定(TOSI)	
	✓	排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)		その他	✓	周波数と設置ICWの一致
	✓	お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水／湯逆配管NG)			✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
	✓	給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)				運転・お手入れ方法の説明
	✓	給湯温度(45～50℃)			✓	装置内運転時異音・振動
電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	運転検査結果		☑ 良好 トシ	
	✓	ディスプレイの色あせ・表示確認		☐ 不良		
	✓	電源スイッチの作動状態				
	✓	SDカードの挿入・取外性				
	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと (漏電・熱注意)				
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ				

特記事項