

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

12-01020

No. 140723

配布先	客先	1	納入先	新鋭工業 株式会社 長野支店 殿		機種	OED-1000
環境	環品	1	顧客名	きたむらクリニック 様		機番	100099
			所在地	山梨県中央市若宮23番地2		納入日	平成22年9月17日
			点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成26年7月14日
計	3		返送先	納入先と同じ		出荷日	平成26年7月22日

修理依頼・不具合内容

水槽、フタを中心とした内部清掃・点検依頼

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検および作業内容

水槽およびフタの分解清掃を実施しました。
フタに付着した水滴がカバー下側の隙間に入らないように加工いたしました。

写真1：フタ加工前

写真2：フタ加工後（カバー4mmカット、シリコン充填）



カバーの隙間



加工の効果を検証いたします。今後、変化がありましたら連絡ください。
よろしくお願いいたします。

〔2〕性能測定

- 1：オゾン水濃度測定（規定値 0.7 ± 0.2 ppm）：0.68ppm・・・正常
- 2：運転確認・・・正常（濃度計パルス：331）

〔3〕出荷時の装置情報

運転プログラム：Ver0107/T01A 前回定期点検日：2013年10月21日

交換後運転回数：198

殺菌：40 殺菌＋アルコール：825 リークチェック：6 自己洗浄：389 アルコール単独：9 I7単独：0

交換部品

承認
安 14.7.23 田
審査
中 26.7.23 澤
作成
H26.7.23 中澤

部品番号	部品名称	数量	備考

（株）IHIシバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL:086-944-6528