

# 修理報告書（出張修理）

修理依頼  
番号

No. 20140820

|     |                |      |     |     |                  |
|-----|----------------|------|-----|-----|------------------|
| 納入先 | 新鋭工業（株）長野支店 殿  |      |     | 機種  | OED-1000         |
| 顧客名 | 東御市立みまき温泉診療所 殿 |      |     | 機番  | 100560           |
| 所在地 | 長野県東御市布下 6-1   |      |     | 納入日 | 平成 24 年 9 月 26 日 |
| 点検者 | 元森 信吾          | 作業時間 | 1 h | 受付日 | 平成 26 年 8 月 20 日 |
| 返送先 | 納入先と同じ         |      |     | 作業日 | 平成 26 年 8 月 20 日 |

## 修理依頼・不具合内容

8/20 オーバーフロー異常（E:205）・・・4回  
8/20 レベルセンサ異常（E:214）・・・4回

## 不具合原因（故障箇所）と処置

### 〔1〕点検結果


コントロール基板の不具合が原因で、基板内部の水位レベルセンサの電気回路に不具合があり、異常が発生しました。

この部品を交換して運転確認をして異常がないことを確認いたしました。

写真：コントロール基板

### 〔2〕修理・点検内容

- 1：部品 交換（下表と写真をご参照ください）
- 2：オゾン水濃度測定：0.71～0.74ppm・・・正常
- 3：運転確認・・・・・・・・・・・・・正常

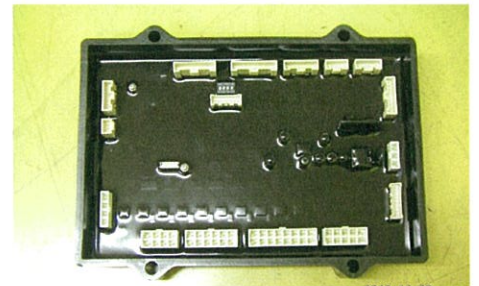

### 〔3〕装置情報

殺菌：3 消毒＋アルコール：69 リークチェック：71  
自己洗浄：42、ア単独：0 エア単独：0

| 装置情報          |                |
|---------------|----------------|
| 型式            | OED-1000       |
| 製造番号          | 128560         |
| プログラム         | Ver. 2107/101A |
| 納入年月日         | 12/09/26       |
| 前回定期交換日       | 13/09/26       |
| 交換後運転回数       | 29             |
| 運転回数（殺菌）      | 3              |
| 運転回数（殺菌＋アル）   | 69             |
| 運転回数（リークチェック） | 71             |
| 運転回数（自己洗浄）    | 42             |
| 運転回数（ア単独）     | 0              |
| 運転回数（エア単独）    | 0              |

一以上一

## 交換部品

| 部品番号 | 部品名称     | 数量  | 備考 |
|------|----------|-----|----|
|      | コントロール基板 | 1 枚 |    |
|      |          |     |    |
|      |          |     |    |
|      |          |     |    |

承認

安  
74.8.20  
田

審査

中  
26.8.20  
澤

作成

H26. 8. 20

元森

（株）IHIシパウラ

長野県松本市石芝 1-1-1 TEL:0263-25-8546