



株式会社IHI

機械事業本部 営業

〒704-8122

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

作業用

お客様	名称	山田産科クリニック	製造番号	100171	ご確認 定
	住所	千葉県東金市南上宿21-5	納入日	2016.12.8	
		0475-55-5522	納入検査実施者	エムシーサービス(株) 小泉	

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認 ドアLOCK位置確認
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	ドア開閉時装置設置位置がずれないこと
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	スペース	✓	装置設置スペースの確保 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	✓	運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認
	✓	洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の濡れ		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認
	✓	洗剤投入量の確認		⑦	ラック仕様切換(ハンドピースラック・標準ラック)
	✓	ローラーポンプの動作確認		無	温水使用切換
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	評価 性能	✓	インジケーターによる残渣判定(TOSI)
	✓	排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)		✓	周波数と設置ICWの一致
	✓	お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水ノ湯逆配管NG)		✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
	✓	給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)		✓	運転・お手入れ方法の説明 後日対応
		給湯温度(45～50℃)		その他	✓
電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	運転 検査 結果	☒ 良好	トシ ■■■■■■■■■■
	✓	ディスプレイの色あせ・表示確認		☐ 不良	
	✓	電源スイッチの作動状態			
	✓	SDカードの挿入・取外性			
	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと (漏電・熱注意)			
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

特記事項

試運転時、(お湯)給湯設備の取付けは行いましたが、給湯の元バルブの方が開ける事ができなりました。水のみで試運転の為、給湯設備の漏れ確認の方ができていません。取説時、確認をお願い致します。
※ 温水併用の設定に変更してあります。