

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成26年9月25日

機種名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号：100560
作業年月日	平成26年9月25日		作業時間：1 Hr
顧客名	東御市立みまき温泉診療所		TEL：0268-61-6002
所在地	長野県東御市布下6番地1		担当：院長先生
販売店	(株)メダイセオ		担当：高橋
納入年月日	平成24年9月20日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/>	総合点検 <input type="checkbox"/>	1年 1回目
<input checked="" type="checkbox"/> 出張 <input type="checkbox"/> 引取	修理 <input type="checkbox"/>	定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>	
			修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合特になし

不具合原因、作業内容

点検作業実施

点検項目							
フタロック	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED	正常 <input checked="" type="checkbox"/>				
酸素ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>				
アルコールライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	バルブ数	520		
オゾンセンサ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>				
給水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>				
濃度計流量	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>				
水位センサー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	履歴			ppm
水漏れ確認	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常 <input checked="" type="checkbox"/>				
清掃	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	電源コード	正常 <input checked="" type="checkbox"/>				
トレー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	清掃	<input checked="" type="checkbox"/>				
殺菌槽コネクタ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常 <input checked="" type="checkbox"/>				

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

異常ありませんでした。


装置情報	交換後運転回数：32	更新 (リセット) <input checked="" type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施	殺菌：4	殺菌+7L：71
	リークチェック：73	自己洗浄：45	7L単独：0	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		<input checked="" type="checkbox"/>	1	コネクタ継手 (本体側)		<input checked="" type="checkbox"/>	1
排水栓		<input checked="" type="checkbox"/>	1	コネクタ継手 (コネクタ側)		<input type="checkbox"/>	1
濃度計ノアルター		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	
オゾン濃度計		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	
オゾンセンサー		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

平成26年9月25日

ご署名 木島 千あみ 

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店
長野県松本市高宮東5-13
TEL：0263-24-2840

責任技術者	作業者
H26.9.25 	H26.9.25 